

Cliente
Ospedale
Città
CAP
Paese
c.a. XXX

Avviso di sicurezza: D999 Confezione delle membrane, pO_2 , per ABL5/50/5XX

Livello di priorità: Urgente

Gentile Cliente,

RADIOMETER ha rilevato di recente che un lotto di confezioni di membrane è stato prodotto utilizzando una soluzione elettrolitica non adeguata.

È stato riscontrato che alcune di queste membrane in seguito a calibrazione forniscono risultati validi per alcuni giorni (4-6 giorni) prima che la cal 2 non sia accettata al punto zero. Quando ciò accade, un bias positivo aumenta rapidamente finché le membrane non vengono scartate dalla cal 2 successiva. La cal 2 viene eseguita ogni 4 ore; pertanto, entro questo lasso di tempo, sussiste un rischio possibile di ottenere risultati della misura errati.

Prodotto interessato:

D999 confezione di membrane per elettrodo pO_2 E909 per ABL5/50/5XX, 942-042, R0971.

Cosa dovete fare:

- Verificare le giacenze ed eliminare le eventuali confezioni di membrane D999 del lotto interessato
- Smaltire tutte le confezioni di membrane del lotto interessato in Vostro possesso
- Compilare la pagina 2 della presente lettera e rispedirla a De Mori S.p.A..

Tutte le confezioni di membrane del lotto interessato ricevute presso la Vostra struttura saranno risarcite da RADIOMETER.

Per qualsiasi domanda o richiesta, Vi preghiamo di contattare A. De Mori S.p.A..

Cordiali saluti
A. De Mori S.p.A.

Modulo di risposta al richiamo da restituire via fax

Numero fax: 02 58011339

Oggetto:

D999 Confezione delle membrane, pO_2 , per ABL5/50/5XX

- Ho ricevuto la lettera ai Clienti ed ho provveduto a revisionare l'inventario attuale delle confezioni di membrane. Tutte le confezioni di membrane del lotto 942-042, R0971 sono state eliminate dal magazzino e sono state smaltite.
- Non ho disponibile a magazzino nessuno dei prodotti coinvolti.

Nome dell'Ospedale:	
Nome:	
Data:	
Firma:	
Indirizzo e-mail:	