

**AVVISO URGENTE  
PER LA SICUREZZA NEL SITO**

GE Healthcare

Healthcare Systems  
9900 Innovation Drive  
Wauwatosa, WI 53226  
USA

Rif. interno GE Healthcare: FMI 17095

3 febbraio 2014

A: Amministratori ospedalieri/Responsabili clinici dei rischi  
Responsabili dei reparti di Radiologia  
Radiologi

RIF: **Opzione radiografia digitale wireless (WDR1): Problema di selezione paziente errata.**

GE Healthcare è venuta a conoscenza di un problema del software associato con la selezione del paziente dall'elenco di lavoro nell'opzione Radiografia digitale wireless (WDR1) che potrebbe incidere sulla sicurezza del paziente. **Si raccomanda pertanto di comunicare a tutti i potenziali utenti presenti nella propria struttura sia il presente avviso, sia le relative azioni correttive raccomandate.**

**Problema  
di sicurezza**

A intermittenza, quando un grande numero di esami paziente viene recuperato dal sistema HIS/RIS (Hospital Information System/Radiology Information System), gli esami non venivano visualizzati correttamente in WDR1. Quando si verifica questo problema, se l'utente continua a tentare di selezionare uno degli esami, il sistema aggiorna la schermata e aggiornando potrebbe selezionare un esame/paziente diverso. Se l'utente nota questa modifica e continua a eseguire l'esame, le immagini vengono inserite in un file paziente errato.

**Istruzioni per  
la sicurezza**

Quando si utilizzano i sistemi basati su WDR1 per gli esami, l'utente deve fare molta attenzione all'esame/voce selezionata dall'elenco di lavoro prima di selezionare il pulsante Avvia esame per assicurarsi che il sistema non aggiorni e selezioni un esame errato. L'utente può anche confermare, durante l'esame che sono state selezionate le informazioni paziente appropriate guardando quanto visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. Come regola generale, prestare particolare attenzione ai casi acquisiti prima dell'applicazione delle istruzioni indicate in precedenza, in quanto possono essere interessati da problemi di sicurezza.

**Dettagli  
del prodotto  
in questione**

Precision 500D e Proteus XR/a dotati di opzione Radiografia digitale wireless (WDR1).

**Correzione  
prodotti**

GE Healthcare invierà un tecnico di assistenza sul campo GE per installare, senza alcun costo per l'utente, una versione software per la risoluzione del problema.

**Informazioni  
di contatto**

In caso di domande riguardanti questa azione correttiva 'sul campo' o le modalità di identificazione dei dispositivi coinvolti, contattate pure il vostro referente locale delle funzioni di vendita e/o assistenza tecnica.

Potete anche contattare il Supporto Tecnico di riferimento al numero :

**Italia:**

Nord Ovest: T. 800827164 opz.2 - Fax 800014110  
Nord Est: T. 800827166 opz. 2 - Fax 800917292  
Centro + Sardegna: T. 800827168 opz. 2 - Fax 800917293  
Sud: T. 800827170 opz. 2 - Fax 800917294  
email: ServiceCentreMilanOffice@ge.com

**Svizzera:** 0800 55 69 58


GE Healthcare vi conferma che questo avviso è già stato comunicato al Ministero competente.

Il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e qualità è la nostra massima priorità. Per eventuali domande, contattare immediatamente GE Healthcare.

Cordiali saluti,



James Dennison  
Vice Presidente QARA  
GE Healthcare Systems

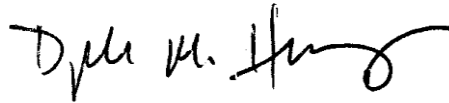

Douglas M. Hansell, M.D., MPH  
Chief Medical Officer  
GE Healthcare