



**AVVISO URGENTE  
PER LA SICUREZZA NEL SITO**

GE Healthcare

Healthcare Systems  
9900 Innovation Drive  
Wauwatosa, WI 53226  
USA

Rif. interno GE Healthcare: FMI 10879

29 May 2013

A: Amministratori ospedalieri/Responsabili clinici dei rischi  
Responsabili di Radiologia/Cardiologia  
Radiologi/Cardiologi

RIF: **Potenziale punto debole del sostegno del Dual CRT monitor a soffitto nei sistemi di imaging radiografico Precision 500D.**

GE Healthcare è venuta recentemente a conoscenza di un potenziale problema di sicurezza relativo al sostegno del monitor da soffitto. **Si raccomanda pertanto di comunicare a tutti i potenziali utenti presenti nella propria struttura sia il presente avviso, sia le relative azioni correttive raccomandate.**

**Problema  
di sicurezza**

Esiste la possibilità che il dado di blocco si allenti e fuoriesca dalla banda di sostegno del monitor, provocando un urto. Ciò non causa la caduta immediata del monitor sospeso, dal momento che questo viene mantenuto in posizione dalla boccola e dalla vite in assenza del dado di blocco. Ad oggi, non è stata riportata nessuna lesione o segnalazione dovuta a questo problema.

**Istruzioni per  
la sicurezza**

Se si osserva un movimento eccessivo o bulloneria allentata della banda di sospensione del monitor, interromperne l'utilizzo e contattare immediatamente il Rappresentante dell'assistenza locale di GE Healthcare.

**Dettagli  
del prodotto  
in questione**

Precision 500D (Numero di catalogo: 2288798) con sostegno per monitor Dual CRT (Numero di catalogo: 2236709) prodotti da GE Healthcare.

**Correzione  
prodotti**

GE Healthcare apporterà le dovute modifiche senza addebitare alcun costo aggiuntivo al cliente. Per l'implementazione della correzione, un rappresentante dell'assistenza GE Healthcare provvederà a mettersi in contatto con l'utente.

**Informazioni  
di contatto**

In caso di domande riguardanti questa azione correttiva 'sul campo' o le modalità di identificazione dei dispositivi coinvolti, contattate pure il vostro referente locale delle funzioni di vendita e/o assistenza tecnica al numero :

*Nord Ovest: T. 800827164 opz.2 - Fax 800014110*

*Nord Est: T. 800827166 opz. 2 - Fax 800917292*

*Centro + Sardegna: T. 800827168 opz. 2 - Fax 800917293*

*Sud: T. 800827170 opz. 2 - Fax 800917294*

*Svizzera: 0800 55 69 58*

*email: [ServiceCentreMilanOffice@ge.com](mailto:ServiceCentreMilanOffice@ge.com)*


GE Healthcare vi conferma che questo avviso è già stato comunicato al Ministero competente.

Il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e qualità è la nostra massima priorità. Per eventuali domande, contattare immediatamente GE Healthcare.

Cordiali saluti,



James Dennison  
Vice Presidente QARA  
GE Healthcare Systems

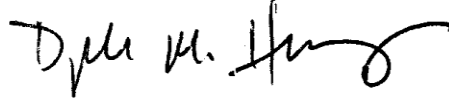

Douglas M. Hansell, M.D., MPH  
Chief Medical Officer  
GE Healthcare