

URGENTE COMUNICAZIONE DI SICUREZZA SUL CAMPO

**Informativa riguardo la SOSPENSIONE d'USO
del Cavo di Estensione Bobine**

**No. : FCO-MR-14-0001Z
Control No. : QAM 14-001B
Tipo di Azione: Richiamo
Maggio 2014**

Gentile Cliente,

Questo documento contiene importanti informazioni per continuare ad utilizzare in modo sicuro e corretto il suo tomografo a risonanza magnetica OASIS.


Dettaglio dei dispositivi coinvolti:

Nome Prodotto : OASIS

Descrizione del problema:

Nell'effettuare esami RM al distretto Spalla mediante il sistema Oasis di Hitachi impiegando la bobina spalla congiuntamente al cavo di estensione bobine potrebbe verificarsi un fenomeno di surriscaldamento del floating circuit cover.

E' importante notare che, al momento, quanto sopra non ha prodotto lesioni a pazienti.

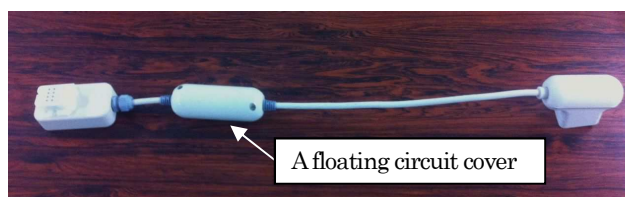

Cavo estensione bobine

Azioni da intraprendere da parte degli utilizzatori:

Si richiede di sospendere l'uso del cavo di estensione bobine fino a quando lo studio della causa di questo fenomeno e le relative azioni correttive non saranno messi in atto.
