

**Urgent Field Safety Notice**  
**Abbott Molecular Inc.****Prodotto:** *m24sp* Instrument**Numero di listino:** 3N06-01

Il problema non riguarda dei numeri di serie specifici.

Giugno 2014

Gentile Cliente,

la presente lettera contiene informazioni importanti relative allo strumento *m24sp*. Si prega di leggerla attentamente.

**Contesto**

Abbott Molecular ha riscontrato la possibile disattivazione del sensore del liquido del sistema e del sensore del liquido di scarico dello strumento *m24sp* dovuta ad una problematica legata al Database delle applicazioni dell'*m24sp*.

**Impatto sui clienti**

Se il sensore del liquido del sistema ed il sensore del liquido di scarico sono disattivati, lo strumento *m24sp* non segnalerà quando il contenitore del liquido del sistema dovrà essere riempito o quando il contenitore del liquido di scarico dovrà essere svuotato.

Se si seguono le Istruzioni operative e si effettua la Manutenzione quotidiana come indicato nel Manuale d'Impiego dell'*m24sp* non vi saranno conseguenze poiché i contenitori sono sufficientemente capienti per contenere una quantità giornaliera sufficiente di liquido del sistema e di liquido di scarico.

**Azioni da intraprendere**

Continuare a seguire le Istruzioni operative ed effettuare la Manutenzione quotidiana come indicato nel Manuale d'Impiego dell'*m24sp*.

Capitolo 9, Manutenzione quotidiana:

- Vuotare i contenitori dei rifiuti solidi e dei liquidi di scarico
- Riempire il contenitore del liquido di sistema

Capitolo 5, Istruzioni operative, da eseguire prima di ciascuna seduta analitica:

- Verificare che il liquido del sistema sia sufficiente per l'analisi e che i contenitori dei liquidi e dei solidi di scarico siano vuoti. Se necessario, riempire con liquido del sistema e vuotare i liquidi e i solidi di scarico.

Il personale Abbott verificherà l'attivazione dei sensori del liquido del sistema e del liquido di scarico durante l'installazione della versione 7.0 del Database delle applicazioni. Abbott Molecular prevede che questa versione del Database sarà disponibile nel terzo trimestre del 2014.

Si prega di trasmettere la presente informativa al personale di laboratorio e di conservarla per riferimenti futuri. Per eventuali chiarimenti relativi alla presente informativa contattare il Servizio Clienti Abbott Molecular. Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati al laboratorio.

Cordiali saluti,

Julio Salwen  
Quality Assurance  
Abbott Molecular Inc.