

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE

«IA_Customer_Name»
«IA_Facility_Site»
«IA_Street_Address»
«IA_City», «IA_State» «IA_Zip_Code»

Problema: movimento accelerato del pensile OTC

Prodotto: DX-D 600

Gentile Cliente,

Agfa HealthCare desidera portare alla Sua attenzione le seguenti informazioni, che sono state comunicate anche alle autorità competenti del Suo paese.

Dispositivo

Il presente Avviso di sicurezza riguarda la Sua unità DR "DX-D 600".

Una descrizione del prodotto è disponibile sul nostro sito web → [DX-D 600](http://www.agfahealthcare.com/global/en/diagnostic_imaging/digital_radiography/dr_dx_d_600/index.jsp)
(http://www.agfahealthcare.com/global/en/diagnostic_imaging/digital_radiography/dr_dx_d_600/index.jsp)

Problema

L'unità è dotata di misure di sicurezza, affinché non possa verificarsi nessun movimento senza l'interazione dell'utilizzatore. Durante i normali movimenti, tuttavia, sono stati osservati casi di accelerazione del pensile OTC (*Overhead Tube Crane*).

Azioni

In caso di movimento accelerato, rilasciare immediatamente il pulsante/pedale per arrestare l'unità e informare subito la persona di riferimento dell'assistenza Agfa HealthCare.

La preghiamo di divulgare tali informazioni all'interno della Sua struttura a tutti i soggetti che devono esserne a conoscenza.

È importante effettuare le azioni descritte nell'Avviso di sicurezza urgente e che la Sua organizzazione confermi la ricezione di questo Avviso di sicurezza urgente.

Qualora le informazioni sopramenzionate non si applichino alla Sua struttura, o se il dispositivo è stato trasferito presso un'altra organizzazione, La preghiamo di indicarcelo nel modulo di feedback allegato e di inoltrare questo Avviso di sicurezza urgente all'organizzazione presso la quale è stato trasferito il dispositivo.

La ringraziamo per la Sua attenzione in merito a tale problema e per il Suo costante supporto.

Se ha domande su questo argomento, contatti la Sua organizzazione Agfa HealthCare locale: **<Nome della persona di riferimento>** al n. **<Tel>**.

Cordiali saluti,
Paul Merckx, Direttore della divisione commerciale QARA Imaging



Agfa HealthCare NV
Septestraat 27

<Data>

PR1305130018



B-2640 Mortsel
Belgio

<Data>

PR1305130018

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE
MODULO DI FEEDBACK

La preghiamo di restituirci le informazioni allegate il prima possibile.
Grazie per la Sua collaborazione.

Nome della struttura/cliente: «IA_Customer_Name» «IA_Facility_Site»

Indirizzo: «IA_Street_Address»

«IA_City», «IA_State» «IA_Zip_Code»

Riferimento avviso: PR1305130018**Riferimento prodotto:** DX-D600

- Confermo di avere ricevuto e compreso l'avviso allegato.
- Questo avviso non si applica alla mia struttura.
- Il dispositivo è stato trasferito presso un'altra organizzazione. Inserire nome e indirizzo dell'altra organizzazione:

Cliente:

Nome:

Posizione:

Firma:

Data:

Numero di telefono:

- Vi prego di correggere le nostre informazioni di contatto come segue:

Nome della struttura/cliente:

Indirizzo:

Ci invii questo modulo completato via fax al n. <n. di fax>
oppure ci invii un'e-mail all'indirizzo <indirizzo e-mail> indicando il codice di

<Data>

PR1305130018

riferimento sopramenzionato nella riga dell'oggetto