



42 RUE BENOÎT FRACHON  
93013 BOBIGNY CEDEX - FRANCIA  
www.peters-surgical.com

TEL.: 33 (0)1 48 10 62 62  
FAX: 33 (0)1 48 91 22 99  
E-MAIL: peters@peters-surgical.com

«RSSC»  
All'attenzione del Farmacista Responsabile e del  
Direttore di stabilimento  
«Indirizzo»  
«Completamento indirizzo» «Continuazione indirizzo»  
«Codice Postale» «Città»  
«Paese»

Nostro Rif. : MRS/14-079

Bobigny, il 17 giugno 2014

**LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO – Questa lettera fa seguito a un fax precedentemente inviato.**

**IMPORTANTE E URGENTE – RICHIAMO DI PRODOTTO**

**MOTIVO DEL RICHIAMO:**

Su alcune suture abbiamo riscontrato un potenziale disgregamento del prodotto di trattamento situato sulle loro estremità. Questo trattamento serve a facilitare il procedimento di serraggio dei nostri aghi. È limitato a circa un centimetro di queste estremità. Quindi, la parte di filo trattata non si impianta.

Questo fenomeno può essere visibile a occhio nudo e non interessa tutte le suture. Non mette in questione l'integrità e le proprietà delle suture interessate che sono conformi alle farmacopee in vigore.

Tuttavia, anche se la probabilità è molto ridotta, non si può totalmente escludere che una serie di circostanze sfavorevoli possa portare a un'occlusione dei vasi di piccole dimensioni in seguito al distacco di un micro-frammento.

Pertanto, come misura preventiva, abbiamo deciso di realizzare il richiamo volontario del lotto dei prodotti interessati: **CARDIOXYL®**, **CARDIOFLON® Evolution** e **SURGIKIT®**.

I codici e i lotti interessati sono elencati nell'allegato a questo documento.

Al fine di facilitare il trattamento di questo richiamo, vi preghiamo di verificare il vostro stock al più presto e di rimandarci il documento allegato dopo aver inserito le quantità in vostro possesso come anche i vostri dati.

Per qualsiasi domanda di tipo logistico (presa in carico del reso, credito, sostituzione...), potete contattare **«Assistente\_Tel»**.

Per qualsiasi altra domanda, potete contattare il servizio Qualità ai seguenti recapiti:

N° tel.: (33) 01 48 10 62 35

E-mail: [qualite@peters-surgical.com](mailto:qualite@peters-surgical.com)

Ci scusiamo per tutti i disagi causati da questo richiamo.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione.



42 RUE BENOÎT FRACHON  
93013 BOBIGNY CEDEX - FRANCIA  
www.peters-surgical.com

TEL.: 33 (0)1 48 10 62 62  
FAX: 33 (0)1 48 91 22 99  
E-MAIL: peters@peters-surgical.com

Indicate i vostri dati, aggiungete le quantità presenti nel vostro stock per ogni lotto, e mandate tutto per **fax al n° 01 48 10 62 72**

**IMPORTANTE E URGENTE – RICHIAMO DI PRODOTTO**

**ALLEGATO al documento MRS/14-079**

N° Cliente: «NCLI»  
«RSSC» - Fax: «Fax\_Cliente»  
«Città»

Assistente ADV: «Assistente»

Numero totale di pagine compilate: .....  
il: .....  
Mansione: ..... n° tel.: .....

PRODOTTO INTERESSATO	CODICE	LOTTO	QUANTITA' IN STOCK
«DESI_1»	«NART_1»	«NLOT_1»	
«DESI_2»	«NART_2»	«NLOT_2»	
«DESI_3»	«NART_3»	«NLOT_3»	
«DESI_4»	«NART_4»	«NLOT_4»	
«DESI_5»	«NART_5»	«NLOT_5»	