

10/10/2014

**INFORMATIVA URGENTE SULLA SICUREZZA PER GLI UTILIZZATORI –
Comunicazione relativa ad un richiamo volontario del prodotto**

Prodotto interessato: Componente di connessione Endo-Modell® SL®,
misura piccola

Data di fabbricazione: da 01/2014 a 08/2014

Numero di riferimento LINK®: R-2014-02

Gentili Signore ed egregi Signori,

È stato identificato un rischio correlato all'impiego della componente di connessione Endo-Modell® SL®, misura piccola. Per un errore di produzione, il fermo della componente di connessione sporge eccessivamente. A causa del fermo di estensione troppo lungo potrebbe non essere possibile montare il piatto tibiale.

Dalla nostra documentazione risulta che voi abbiate ricevuto forniture dell'impianto in questione, pertanto vi preghiamo di leggere attentamente le avvertenze specifiche riportate nelle pagine allegate.

Siete comunque pregati di rinviarci il modulo di risposta via fax relativo alla documentazione del richiamo entro il 31.10.2014, anche nel caso in cui non abbiate a magazzino i prodotti interessati.

Per concludere desideriamo scusarci per l'inconveniente e ringraziarvi per la vostra comprensione.

Cordiali saluti
WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG



Dr. Thomas Mehler
Direttore Gestione Qualità &
Responsabile Sicurezza



Philipp Kottmann
Vice Responsabile Sicurezza
Gestione Qualità

