

**Avviso di sicurezza sul campo**  
**Correzione urgente relativa a dispositivo medico –**  
**2955842-03-13-2015-003-C**

*Aspetto opaco e/o possibili lacerazioni nelle coperture del sistema*

<p><b>Premessa e motivazione dell'azione</b></p>	<p>Gentile Cliente <i>da Vinci</i>,</p> <p>questo avviso di sicurezza sul campo è inteso a informarLa che Intuitive Surgical sta avviando una correzione volontaria relativa alle coperture del sistema prodotte da Microtek Medical e utilizzate con i Sistemi chirurgici <i>da Vinci® Standard™, S™, e Si™</i>. Per rendere il Sistema chirurgico <i>da Vinci</i> adatto a un intervento chirurgico, alcuni componenti sono coperti in modo sterile con coperture in plastica trasparenti e su misura che forniscono una barriera sterile per proteggere le apparecchiature dalla contaminazione e per mantenere un campo sterile.</p> <p>Questa lettera illustra le problematiche specifiche e fornisce istruzioni per l'ispezione al fine di garantire sempre la sicurezza d'uso delle coperture del sistema chirurgico <i>da Vinci</i>.</p> <p>Sono state identificate due problematiche relative alle coperture del sistema chirurgico <i>da Vinci</i>:</p> <p><b><u>Linguette a strappo</u></b> Mediante test standard di qualità del prodotto, si è osservato che le etichette adesive destinate a tenere la copertura ripiegata, in alcuni casi, si sovrapponevano involontariamente a più pieghe della copertura. Questa problematica potrebbe causare piccole lacerazioni quando la copertura si dispiega durante il processo di copertura. Si tratta di un guasto non frequente e la lacerazione delle coperture a causa di questa problematica si è osservata nello 0,8% delle coperture realizzate. Delle oltre 500.000 coperture spedite, sono stati inoltrati due reclami dal campo potenzialmente associati alle lacerazioni delle coperture.</p> <p><b><u>Aspetto opaco, simile a cera:</u></b> Inoltre, i commenti dei clienti di Intuitive Surgical hanno evidenziato che alcune delle coperture utilizzate con i Sistemi <i>da Vinci</i> possono presentare aspetto opaco e simile a cera (riportato in meno dello 0,5% degli interventi). L'aspetto opaco è dovuto a una maggiore presenza di additivo anti-statico nella pellicola della copertura. L'additivo anti-statico non crea particelle che potrebbero staccarsi dalla pellicola. Tuttavia, è possibile che questa sostanza di consistenza simile a quella della cera entri in contatto con il paziente in modo indiretto. Le prestazioni funzionali delle coperture non sono interessate da questa problematica.</p> <p>Questo problema non ha determinato lesioni ai pazienti né ha generato effetti negativi sulla salute determinati da una delle due problematiche.</p>
<p><b>Rischi per la salute</b></p>	<p><b><u>Linguette a strappo</u></b></p> <p>La lacerazione o le lacerazioni possono determinare possibili contaminazioni del campo chirurgico a causa della contaminazione dei guanti del personale sterile che interagisce con i bracci robotici. I guanti contaminati potrebbero successivamente entrare in contatto con il paziente, gli strumenti o le forniture operatorie.</p> <p>Questa contaminazione dei guanti sarebbe simile a una situazione in cui un membro del team operativo inavvertitamente toccasse un oggetto non sterile e non prendesse atto dell'interruzione della tecnica asettica continuando a operare con gli stessi guanti. Il rischio di infezioni aumenta lievemente, in primo luogo con i contaminanti di superficie, cosa che potrebbe incrementare il rischio di infezione della ferita post-operatoria. I pazienti gravemente immunocompromessi possono essere a più alto rischio di infezione.</p>

	<p><b><u>Aspetto opaco, simile a cera:</u></b></p> <p>L'esposizione diretta alla sostanza cerea può provocare irritazione cutanea e sensibilizzazione. La reazione è di lieve entità e limitata alla zona di contatto immediato senza conseguenze a lungo termine sulla salute.</p>																																														
<p><b>Paesi e prodotti interessati</b></p>	<p><b><u>Paesi interessati:</u></b></p> <p>Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro (compreso Hong Kong), Colombia, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Islanda, Italia, Kuwait, Libano, Lussemburgo, Malesia, Mauritius, Messico, Monaco, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Pakistan, Panama, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Taiwan, Turchia, Uruguay, Venezuela, Vietnam</p> <p><b><u>Prodotti interessati per le linguette a strappo:</u></b></p> <table border="1" data-bbox="370 737 1349 1083"> <thead> <tr> <th>Numero parte ISI</th> <th>Nome del prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420015-03</td> <td>Copertura braccio strumento <i>da Vinci Si/S</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>420022-02</td> <td>Copertura braccio telecamera <i>da Vinci S</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>420256-01</td> <td>Kit accessori monouso <i>da Vinci S BRACCIO 3</i>, confezione da 5</td> </tr> <tr> <td>420258-01</td> <td>Kit accessori monouso <i>da Vinci S BRACCIO 4</i>, confezione da 5</td> </tr> <tr> <td>420279-03</td> <td>Copertura braccio telecamera <i>da Vinci Si</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>420291-03</td> <td>Kit accessori monouso <i>da Vinci Si BRACCIO 4</i>, confezione da 5</td> </tr> <tr> <td>420290-03</td> <td>Kit accessori monouso <i>da Vinci Si BRACCIO 3</i>, confezione da 5</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'<b>Allegato A</b> elenca i numeri di lotto interessati.</p> <p><b><u>Prodotti interessati per aspetto opaco/simile a cera:</u></b></p> <table border="1" data-bbox="370 1251 1349 1917"> <thead> <tr> <th>Numero parte ISI</th> <th>Nome del prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400015-03</td> <td>Copertura per braccio strumento <i>da Vinci (Standard)</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>400016-04</td> <td>Copertura per braccio telecamera <i>da Vinci (Standard)</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>400027-04</td> <td>Copertura telecamera <i>da Vinci (Standard)</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>420015-03</td> <td>Copertura per braccio strumento <i>da Vinci Si/S</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>420017-03</td> <td>Copertura monitor carrello paziente <i>da Vinci S</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>420022-02</td> <td>Copertura braccio telecamera <i>da Vinci S</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>420026-01</td> <td>Copertura monitor carrello paziente <i>da Vinci S</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>420256-01</td> <td>Kit accessori monouso <i>da Vinci S BRACCIO 3</i>, confezione da 5</td> </tr> <tr> <td>420258-01</td> <td>Kit accessori monouso <i>da Vinci S BRACCIO 4</i>, confezione da 5</td> </tr> <tr> <td>420273-02</td> <td>Copertura testa telecamera <i>da Vinci Si</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>420279-03</td> <td>Copertura braccio telecamera <i>da Vinci Si</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>420281-02</td> <td>Copertura monitor <i>da Vinci Si</i>, confezione da 20</td> </tr> <tr> <td>420290-03</td> <td>Kit accessori monouso <i>da Vinci Si BRACCIO 3</i>, confezione da 5</td> </tr> <tr> <td>420291-03</td> <td>Kit accessori monouso <i>da Vinci Si BRACCIO 4</i>, confezione da 5</td> </tr> </tbody> </table>	Numero parte ISI	Nome del prodotto	420015-03	Copertura braccio strumento <i>da Vinci Si/S</i> , confezione da 20	420022-02	Copertura braccio telecamera <i>da Vinci S</i> , confezione da 20	420256-01	Kit accessori monouso <i>da Vinci S BRACCIO 3</i> , confezione da 5	420258-01	Kit accessori monouso <i>da Vinci S BRACCIO 4</i> , confezione da 5	420279-03	Copertura braccio telecamera <i>da Vinci Si</i> , confezione da 20	420291-03	Kit accessori monouso <i>da Vinci Si BRACCIO 4</i> , confezione da 5	420290-03	Kit accessori monouso <i>da Vinci Si BRACCIO 3</i> , confezione da 5	Numero parte ISI	Nome del prodotto	400015-03	Copertura per braccio strumento <i>da Vinci (Standard)</i> , confezione da 20	400016-04	Copertura per braccio telecamera <i>da Vinci (Standard)</i> , confezione da 20	400027-04	Copertura telecamera <i>da Vinci (Standard)</i> , confezione da 20	420015-03	Copertura per braccio strumento <i>da Vinci Si/S</i> , confezione da 20	420017-03	Copertura monitor carrello paziente <i>da Vinci S</i> , confezione da 20	420022-02	Copertura braccio telecamera <i>da Vinci S</i> , confezione da 20	420026-01	Copertura monitor carrello paziente <i>da Vinci S</i> , confezione da 20	420256-01	Kit accessori monouso <i>da Vinci S BRACCIO 3</i> , confezione da 5	420258-01	Kit accessori monouso <i>da Vinci S BRACCIO 4</i> , confezione da 5	420273-02	Copertura testa telecamera <i>da Vinci Si</i> , confezione da 20	420279-03	Copertura braccio telecamera <i>da Vinci Si</i> , confezione da 20	420281-02	Copertura monitor <i>da Vinci Si</i> , confezione da 20	420290-03	Kit accessori monouso <i>da Vinci Si BRACCIO 3</i> , confezione da 5	420291-03	Kit accessori monouso <i>da Vinci Si BRACCIO 4</i> , confezione da 5
Numero parte ISI	Nome del prodotto																																														
420015-03	Copertura braccio strumento <i>da Vinci Si/S</i> , confezione da 20																																														
420022-02	Copertura braccio telecamera <i>da Vinci S</i> , confezione da 20																																														
420256-01	Kit accessori monouso <i>da Vinci S BRACCIO 3</i> , confezione da 5																																														
420258-01	Kit accessori monouso <i>da Vinci S BRACCIO 4</i> , confezione da 5																																														
420279-03	Copertura braccio telecamera <i>da Vinci Si</i> , confezione da 20																																														
420291-03	Kit accessori monouso <i>da Vinci Si BRACCIO 4</i> , confezione da 5																																														
420290-03	Kit accessori monouso <i>da Vinci Si BRACCIO 3</i> , confezione da 5																																														
Numero parte ISI	Nome del prodotto																																														
400015-03	Copertura per braccio strumento <i>da Vinci (Standard)</i> , confezione da 20																																														
400016-04	Copertura per braccio telecamera <i>da Vinci (Standard)</i> , confezione da 20																																														
400027-04	Copertura telecamera <i>da Vinci (Standard)</i> , confezione da 20																																														
420015-03	Copertura per braccio strumento <i>da Vinci Si/S</i> , confezione da 20																																														
420017-03	Copertura monitor carrello paziente <i>da Vinci S</i> , confezione da 20																																														
420022-02	Copertura braccio telecamera <i>da Vinci S</i> , confezione da 20																																														
420026-01	Copertura monitor carrello paziente <i>da Vinci S</i> , confezione da 20																																														
420256-01	Kit accessori monouso <i>da Vinci S BRACCIO 3</i> , confezione da 5																																														
420258-01	Kit accessori monouso <i>da Vinci S BRACCIO 4</i> , confezione da 5																																														
420273-02	Copertura testa telecamera <i>da Vinci Si</i> , confezione da 20																																														
420279-03	Copertura braccio telecamera <i>da Vinci Si</i> , confezione da 20																																														
420281-02	Copertura monitor <i>da Vinci Si</i> , confezione da 20																																														
420290-03	Kit accessori monouso <i>da Vinci Si BRACCIO 3</i> , confezione da 5																																														
420291-03	Kit accessori monouso <i>da Vinci Si BRACCIO 4</i> , confezione da 5																																														

<p><b>Azioni a carico del Cliente/ Utente</b></p>	<p><b><u>La invitiamo ad adottare i seguenti provvedimenti:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assicurarsi che tutto il personale interessato sia stato esaurientemente informato del presente avviso. Inoltrare il presente avviso al Suo Responsabile gestione rischi, al Responsabile sala operatoria, al Responsabile acquisti, al personale di Ingegneria biomedica e ai componenti dell'équipe medica che svolge procedure chirurgiche con il Sistema <i>da Vinci</i>.</li> <li>2. Prima dell'uso, valutare le coperture seguendo le istruzioni per l'ispezione allegate (<b>Allegato B</b>). Questa ispezione non è necessaria per le coperture prodotte dopo il 6 marzo 2015. Questa data si riferisce ai numeri di lotto successivi al numero 066 indicati nel seguente formato: D15066xx o DA15066xx. Vedere allegato A per individuare le informazioni sul lotto sull'etichetta.</li> <li>3. Se la valutazione identifica prodotti interessati, La preghiamo di contattare il Servizio assistenza clienti (informazioni di contatto indicate qui di seguito) per organizzare le procedure di autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA) per restituire le coperture interessate. Saranno fornite coperture sostitutive.</li> <li>4. Conservare una copia del presente Avviso.</li> </ol>
<p><b>Azioni da intraprendere da parte di Intuitive Surgical</b></p>	<p>I rappresentanti di Intuitive Surgical saranno disponibili per via telefonica per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Completare le procedure di autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA) relativamente al prodotto interessato.</li> <li>2. Rispondere a qualsiasi domanda in merito alla presente Correzione di dispositivo medico.</li> </ol>
<p><b>Ulteriori informazioni e assistenza</b></p>	<p>Per ulteriori informazioni o assistenza in merito alla presente Correzione relativa a dispositivo medico, contatti il Suo Rappresentante o il Servizio assistenza clienti di Intuitive Surgical ai numeri indicati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nord e Sud America: (800) 876-1310 Opzione 3 (6:00 - 17:00 PST) o via e-mail all'indirizzo: <a href="mailto:customersupport-servicesupport@intusurg.com">customersupport-servicesupport@intusurg.com</a></li> <li>• Europa, Medio Oriente, Asia e Africa: +800 0821 2020 oppure +41 21 821 2020 (8:00 - 18:00 CET), o via e-mail all'indirizzo: <a href="mailto:ics@intusurg.com">ics@intusurg.com</a></li> <li>• Corea del Sud: 02-3271-3200 (9:00 - 18:00 KSTJ)</li> <li>• Giappone: 0120-56-5635 o 003-5575-1362 (9:00 - 18:00 JST)</li> </ul>

La informiamo che il presente avviso è stato notificato alle Autorità normative locali del Suo Paese.

In fede,

**Intuitive Surgical**  
1266 Kifer Road, Building 101  
Sunnyvale, CA 94086-5304 USA  
800-876-1310

**MODULO DI RICEVUTA**  
**Avviso di sicurezza sul campo**  
**Correzione urgente relativa a dispositivo medico –**  
**2955842-03-13-2015-003-C**

*Aspetto opaco e/o possibili lacerazioni nelle coperture del sistema*

Nome ospedale: <mail merge>

Indirizzo: <mail merge>

Città, CAP: <mail merge>

NSID: <mail merge>

ATTENZIONE: <mail merge>

1. Ho ricevuto e letto il presente Avviso di correzione.
2. Ho provveduto a informare tutto il personale interessato del contenuto del presente Avviso.
3. Contatterò Intuitive Surgical per qualsiasi dubbio o domanda.

Nome (in stampatello): \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nome dell'ospedale: \_\_\_\_\_

Numero di telefono: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Posizione:

- Coordinatore per la robotica  
 Responsabile sala operatoria  
 Responsabile gestione rischi  
 Coordinatore resa merci  
 Altro: \_\_\_\_\_

**LA PREGHIAMO DI INVIARE VIA FAX O VIA E-MAIL QUESTO MODULO DI RICEVUTA A Intuitive Surgical, Inc.**  
**ALL'ATTENZIONE DI: REGULATORY COMPLIANCE**  
**Oggetto dell'e-mail: Cloudy Appearance and Potential Tears on System Drapes**  
**Negli U.S.A. inviare al numero di fax +1 (408) 716-3040, oppure scansionare e inviare per e-mail**  
**all'indirizzo: [isi.compliance@intusurg.com](mailto:isi.compliance@intusurg.com)**

**Servizio Assistenza Clienti:**

- America del Nord e del Sud: 800-876-1310 Opzione 3 (6:00 - 17:00 PST)
- Giappone: 0120-56-5635 o 03-5575-362 (9:00 - 18:00 JST)
- Corea del Sud: 02-3271-3200 (9:00 - 18:00 KSTJ)
- Europa, Medio Oriente, Asia e Africa: +800 0821 2020 oppure +41 21 821 2020 (8:00 - 18:00 CET), o via e-mail all'indirizzo: [ics@intusurg.com](mailto:ics@intusurg.com)

## Allegato B – Istruzioni per l'ispezione


### Prima dell'uso, ispezionare le coperture mediante la seguente procedura:

1. **Infermiere di sala operatoria:** passa la copertura allo strumentista in maniera sterile.
2. **Strumentista:** dispiega la copertura su un tavolo sterile (**Figura 1**).



**Figura 1.** – Esempio: Copertura del braccio dello strumento


3. Valutare il materiale della copertura per individuare eventuali aree dall'aspetto opaco e/o una sensazione simile a quella della cera o di unto (**Figura 2**). Se si individuano tali caratteristiche, non utilizzare la copertura. Restituire la copertura a ISI seguendo il processo RMA (Autorizzazione alla restituzione del materiale) standard.

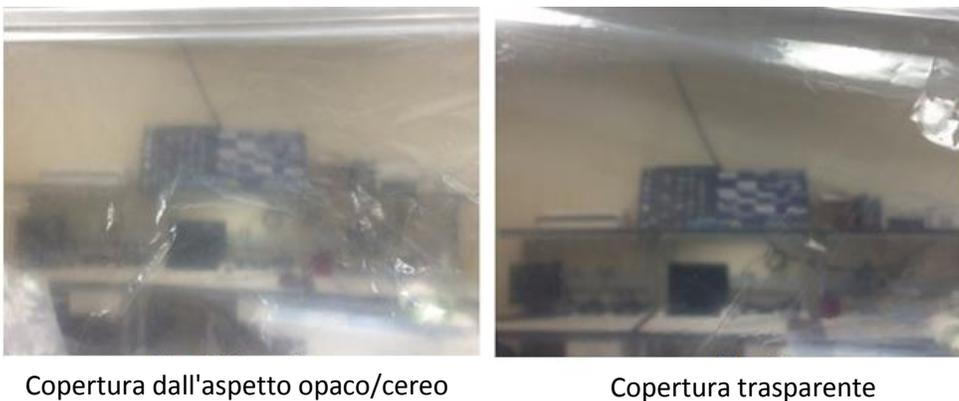

**Figura 2.**

**ESCLUSIVAMENTE per lo strumento e le coperture del braccio telecamera, proseguire adottando i seguenti passaggi:**

4. Identificare l'apertura principale della copertura Tenerla aperta e identificata chiaramente per il successivo utilizzo (**Figura 3**).

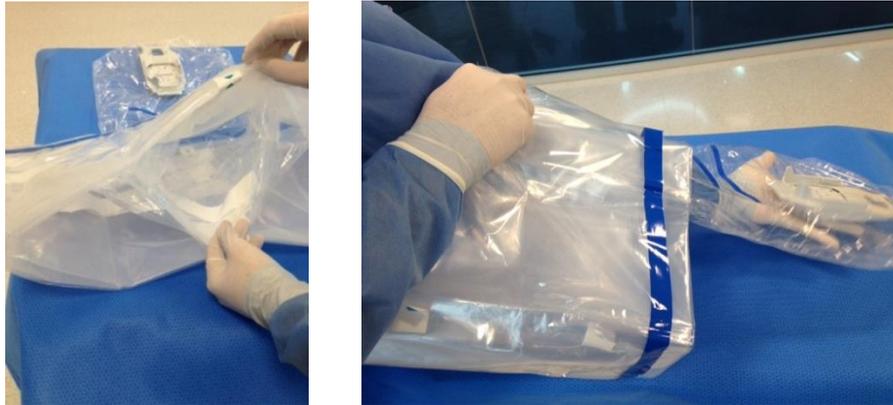

**Figura 3.**

5. Identificare le linguette a strappo posizionate nella parte superiore e inferiore dell'apertura della copertura principale (**Figura 4**).



Copertura per braccio  
strumento

**Figura 4.**

Copertura per braccio  
telecamera

6. **(Figura 5, Passaggio 1)** Dividere la linguetta a strappo superiore lungo la perforazione. **(Figura 5, Passaggio 2)** Separare le pieghe della copertura più esterna per esporre le pieghe della copertura interna **(Figura 5, Passaggio 3)** Ispezionare tutte le pieghe della copertura tra i lembi dell'etichetta divisa per verificare che l'etichetta aderisca soltanto alle pieghe più esterne. Se si individuano pieghe della copertura interna che aderiscono all'etichetta, non utilizzare la copertura. Restituire la copertura a ISI seguendo il processo RMA (Autorizzazione alla restituzione del materiale) standard.



**Figura 5.**

7. Dividere l'etichetta o le etichette a strappo inferiori lungo la perforazione e ripetere il passaggio dell'ispezione 6. Se si individuano pieghe della copertura interna che aderiscono all'etichetta, non utilizzare la copertura. Restituire la copertura a ISI seguendo il processo RMA (Autorizzazione alla restituzione del materiale) standard.
8. Individuare l'apertura principale della copertura e verificare la presenza dell'apertura che conduce all'adattatore sterile. Ripiegare la copertura e afferrare la base dell'apertura con un dito e il pollice, assicurando di tenere in mano tutte le pieghe della copertura ma mantenendo l'apertura principale aperta. Procedere con la copertura in base al manuale utente del sistema.

## Allegato A – Lotti interessati

### 420015-03 Copertura per braccio strumento *da Vinci Si/S*, confezione da 20

D142175	D142535	D142895	D143255	D150135A	D150555	DA142695A	DA143465A
D142175A	D142535A	D142895A	D143255A	D150145	D150555A	DA142725	DA143515
D142185	D142545	D142905	D143285	D150145A	D150565	DA142745	DA150075
D142185A	D142545A	D142905A	D143285A	D150155	D150565A	DA142745A	DA150085
D142195	D142555	D142915	D143295	D150155A	D150575	DA142755	DA150085A
D142195A	D142555A	D142915A	D143295A	D150165	D150575A	DA142755A	DA150125
D142205	D142585	D142935	D143305	D150165A	D150625	DA142765	DA150125A
D142205A	D142585A	D142935A	D143305A	D150195	D150625A	DA142795	DA150135
D142215	D142595	D142945	D143315	D150195A	D150635	DA142795A	DA150135A
D142235	D142595A	D142945	D143315	D150205	D150635A	DA142825	DA150195
D142235A	D142605	D142955	D143325	D150205A	D150645	DA142835	DA150205
D142245	D142605A	D142955A	D143325A	D150215	D150645A	DA142835A	DA150205A
D142245A	D142615	D142965	D143335	D150215A	D150655	DA142885	DA150215
D142255	D142615A	D142965A	D143355	D150225	D150655A	DA142885A	DA150275
D142255A	D142625	D142975	D143355A	D150225A	D150685	DA142905	DA150275A
D142265	D142625A	D142975A	D143365	D150235	D150685A	DA142955	DA150285
D142265A	D142635	D142985	D143365A	D150235A	D150695	DA142965	DA150285A
D142275	D142655	D143005	D143375	D150275	D150695A	DA142965A	DA150295
D142275A	D142655A	D143005A	D143375A	D150275A	DA142185	DA142975	DA150335
D142305	D142665	D143015	D143385	D150285	DA142195	DA143005	DA150345
D142305A	D142665A	D143015A	D143385A	D150285A	DA142205	DA143025	DA150345A
D142315	D142675	D143025	D143395	D150295	DA142235	DA143025A	DA150365
D142315A	D142675A	D143025A	D143395A	D150295A	DA142235A	DA143035	DA150405
D142325	D142685	D143035	D143405	D150305	DA142245	DA143035A	DA150405A
D142325A	D142685A	D143035A	D143425	D150305A	DA142255	DA143085	DA150415
D142335	D142695	D143045	D143425A	D150335	DA142275	DA143095	DA150425
D142335A	D142695A	D143045A	D143435	D150335A	DA142305	DA143105	DA150435
D142345A	D142725	D143075	D143435A	D150345	DA142305A	DA143105A	DA150435A
D142375	D142725A	D143075A	D143445	D150345A	DA142315	DA143115	DA150475
D142375A	D142735	D143085	D143445A	D150355	DA142345	DA143155	DA150475A
D142385	D142735A	D143085A	D143455	D150355A	DA142345A	DA143155A	DA150495
D142385A	D142745	D143095	D143455A	D150375	DA142375	DA143165	DA150495A
D142395	D142745A	D143095A	D143465	D150405	DA142375A	DA143175	DA150515
D142395A	D142755	D143105	D143465A	D150405A	DA142385	DA143175A	DA150515A
D142405	D142755A	D143105A	D143495	D150415	DA142395	DA143185	DA150545
D142405A	D142765	D143115	D143495A	D150415A	DA142455	DA143215	DA150545A
D142415	D142765A	D143115A	D143505	D150425	DA142465	DA143235	DA150555

**420015-03 Copertura per braccio strumento da Vinci Si/S, confezione da 20**

D142415A	D142795	D143155	D143505A	D150425A	DA142485	DA143235A	DA150555A
D142445	D142795A	D143155A	D143515	D150435	DA142515	DA143245	DA150635
D142445A	D142805	D143165	D143515A	D150435A	DA142515A	DA143295	DA150645
D142455	D142805A	D143165A	D150035	D150435A	DA142525	DA143295A	DA150645
D142455A	D142815	D143175	D150065	D150475	DA142535	DA143315	DA150645A
D142465	D142815A	D143175A	D150065A	D150475A	DA142535A	DA143315A	DA150655
D142465A	D142825	D143185	D150075	D150485	DA142585	DA143365	DA150685A
D142475	D142825A	D143185A	D150075A	D150485A	DA142585A	DA143365A	DA150685A
D142475A	D142835	D143215	D150085	D150495	DA142605	DA143385	DA150695
D142485	D142835A	D143215A	D150085A	D150495A	DA142615	DA143385A	DA150695A
D142485A	D142865	D143225	D150095	D150505	DA142615A	DA143395	
D142515	D142875	D143225A	D150095A	D150505A	DA142625	DA143435	
D142515A	D142875A	D143235	D150105	D150515	DA142655	DA143445	
D142525	D142885	D143235A	D150125	D150515A	DA142665	DA143445A	
D142525	D142885A	D143245	D150125A	D150545	DA142685	DA143455	
D142525A	D142885A	D143245A	D150135	D150545A	DA142695	DA143465	

**420022-02 Copertura braccio telecamera da Vinci S, confezione da 20**

D142205	D142375A	D142765A	D143105	D143385	D150155A	D150435A	DA142835
D142205A	D142385	D142835	D143115	D143385A	D150215	D150515	DA143315
D142275	D142485	D142835A	D143175	D143445	D150215A	D150515A	DA143385
D142275A	D142625	D142905	D143175A	D143445A	D150295	D150565	DA150295
D142315	D142625A	D142905A	D143185	D143515	D150295A	D150575	DA150515
D142325	D142655	D142965	D143245	D143515A	D150355	D150575A	
D142335	D142685	D142975	D143255	D150085	D150365	D150645	
D142345	D142695	D143015	D143255A	D150085A	D150365A	D150655	
D142345A	D142695A	D143035	D143315	D150095	D150425	D150655A	
D142375	D142765	D143035A	D143315A	D150155	D150435	DA142625	

**420256-01 Kit accessori monouso da Vinci S BRACCIO 3, confezione da 5**

D142205	D142625	D142905	D143115	D143385	D150295	D150655
D142275	D142695	D142975	D143175	D143445	D150365	
D142345	D142765	D150435	D143255	D150085	D150515	
D142375	D142835	D143035	D143315	D150215	D150575	

**420258-01 Kit accessori monouso da Vinci S BRACCIO 4, confezione da 5**

D141015R	D142485	D142835	D143105	D143385	D150155	D150435
D142205	D142625	D142905	D143175	D143445	D150215	D150515
D142275	D142685	D142965	D143245	D143515	D150295	D150575
D142345	D142765	D143035	D143315	D150085	D150365	D150655

**420279-03 Copertura braccio telecamera da Vinci Si, confezione da 20**

D142175	D142465A	D142765A	D143085	D143385	D150285	D150695A	DA143245
D142175A	D142475	D142795	D143085A	D143395	D150285A	DA142185	DA143285
D142185	D142475A	D142795A	D143095	D143395A	D150295	DA142185A	DA143295
D142185A	D142485	D142805	D143095A	D143405	D150305	DA142235	DA143365
D142195	D142515	D142805A	D143105	D143425	D150335	DA142235A	DA143395
D142195A	D142515A	D142815	D143105A	D143425A	D150335A	DA142245	DA143435
D142205	D142525	D142815A	D143115	D143435	D150345	DA142255	DA143455
D142205A	D142525A	D142825	D143115A	D143435A	D150345A	DA142305	DA143465
D142215	D142535	D142825A	D143155	D143445	D150355	DA142305A	DA143465A
D142215A	D142535A	D142835	D143155A	D143445A	D150355A	DA142455	DA143495
D142235	D142545	D142865	D143165	D143455	D150405	DA142515	DA150075
D142235A	D142545A	D142865A	D143165A	D143455A	D150405A	DA142515A	DA150125
D142245	D142555	D142875	D143175	D143465	D150415	DA142525	DA150125A
D142245A	D142555A	D142875A	D143175A	D143465A	D150415A	DA142535	DA150135
D142255	D142585	D142885	D143185	D143495	D150425	DA142545	DA150145
D142255A	D142585A	D142885A	D143185A	D143495A	D150425A	DA142585	DA150195
D142265	D142595	D142885A	D143215	D143505	D150435	DA142585A	DA150205
D142265A	D142595A	D142895	D143215A	D143505A	D150475	DA142605	DA150205A
D142305	D142605	D142905	D143225	D143515	D150475A	DA142615	DA150275
D142305A	D142605A	D142905A	D143225A	D143515A	D150485	DA142655	DA150275A
D142315	D142615	D142915	D143235	D150035	D150485A	DA142745	DA150285
D142315A	D142615A	D142935	D143235A	D150065	D150495	DA142745A	DA150285A
D142325	D142625	D142935A	D143245	D150065A	D150495A	DA142755	DA150335
D142325A	D142635	D142945	D143245A	D150075	D150505	DA142795	DA150335A
D142335	D142655	D142945A	D143255	D150075A	D150505A	DA142795A	DA150345
D142335A	D142655A	D142955	D143285	D150085	D150515	DA142825	DA150405
D142345	D142665	D142955A	D143285A	D150085A	D150515A	DA142825A	DA150405A
D142345A	D142665A	D142965	D143295	D150125	D150545	DA142865	DA150415
D142375	D142675	D142965A	D143295A	D150125A	D150545A	DA142875	DA150415A
D142375A	D142675A	D142975	D143305	D150135	D150555	DA142885	DA150475
D142385	D142685	D142975A	D143305A	D150135A	D150555A	DA142885A	DA150495
D142385A	D142685A	D142985	D143315	D150145	D150565	DA142945	DA150545
D142395	D142695	D143005	D143315A	D150145A	D150565A	DA142965	DA150545A
D142395A	D142695A	D143005A	D143325	D150165	D150625	DA142975	DA150555
D142405	D142725	D143015	D143325A	D150195	D150625A	DA143005	DA150565
D142405A	D142725A	D143015A	D143335	D150195A	D150635	DA143025	DA150625
D142415	D142735	D143025	D143335	D150205	D150635A	DA143075	DA150635
D142415A	D142735A	D143025A	D143355A	D150205A	D150645	DA143095	DA150645
D142445	D142745	D143035	D143355A	D150215	D150645A	DA143105	DA150685
D142445A	D142745A	D143045	D143365	D150225	D150655	DA143155	DA150695

**420279-03 Copertura braccio telecamera da Vinci Si, confezione da 20 (continua)**

D142455	D142755	D143045A	D143365A	D150235	D150685	DA143185	DA150695A
D142455A	D142755A	D143075	D143375	D150275	D150685A	DA143215	
D142465	D142765	D143075A	D143375A	D150275A	D150695	DA143235	

**420290-03 Kit accessori monouso da Vinci Si BRACCIO 3, confezione da 5**

D142175	D142465A	D142725A	D143005	D143215A	D143455	D150355A	D150695
D142175A	D142475	D142735	D143015	D143225	D143455A	D150415	D150695A
D142185	D142475A	D142735A	D143015A	D143225A	D143465	D150415A	DA142235
D142185A	D142485	D142745	D143025	D143235	D143465A	D150425	DA142305
D142235	D142515	D142755	D143025A	D143235A	D150075	D150425A	DA142515
D142235A	D142515A	D142755A	D143035	D143295	D150085	D150435	DA142615
D142245	D142525	D142795	D143045	D143295A	D150125	D150475	DA142795
D142245A	D142525A	D142795A	D143045A	D143305	D150125A	D150475A	DA142885
D142255	D142535	D142825	D143095	D143305A	D150135	D150485	DA142885
D142305	D142535A	D142825A	D143095A	D143315	D150165	D150485A	DA143025
D142305A	D142605	D142835	D143105	D143325	D150195	D150495	DA150125
D142315	D142605A	D142885	D143105A	D143325A	D150195A	D150545	DA150275
D142315A	D142615	D142885A	D143155	D143365	D150205	D150545A	DA150475
D142345	D142615A	D142885A	D143155A	D143375	D150205A	D150555	DA150545
D142375	D142625	D142895	D143165	D143375A	D150275	D150555A	DA150645
D142375A	D142635	D142905	D143165A	D143385	D150275A	D150635	DA150685
D142385	D142655	D142945	D143175	D143395	D150285	D150635A	
D142385A	D142655A	D142955	D143175A	D143395A	D150305	D150645	
D142395	D142665	D142955A	D143185	D143435	D150345	D150645A	
D142455	D142665A	D142965	D143185A	D143445	D150345A	D150685	
D142465	D142725	D142965A	D143215	D143445A	D150355	D150685A	

**420291-03 Kit accessori monouso da Vinci Si BRACCIO 4, confezione da 5**

D142185	D142405A	D142675	D142865	D143085A	D143405	D150135A	D150505
D142195	D142415	D142675A	D142865A	D143095	D143425	D150145	D150505A
D142195A	D142415A	D142685	D142875	D143115	D143425A	D150145A	D150515
D142205	D142445	D142685A	D142875A	D143115A	D143435	D150205	D150515A
D142215	D142445A	D142695	D142885	D143155	D143435A	D150215	D150555
D142255	D142455	D142695A	D142915	D143235	D143465	D150285	D150565
D142255A	D142455A	D142745	D142935	D143245	D143495	D150285A	D150565A
D142265	D142535	D142745A	D142935A	D143255	D143495A	D150295	D150625
D142265A	D142545	D142755	D142945	D143285	D143505	D150335	D150625A
D142325	D142545A	D142765	D142975	D143285A	D143505A	D150335A	D150635
D142325A	D142555	D142805	D142975A	D143295	D143515	D150345	D150695
D142335	D142555A	D142805A	D142985	D143335	D150065	D150405	DA142585

**420291-03 Kit accessori monouso da Vinci Si BRACCIO 4, confezione da 5 (continua)**

D142335A	D142585	D142815	D143005	D143355	D150065A	D150405A	DA150335
D142345	D142585A	D142815A	D143075	D143355A	D150075	D150415	DA150405
D142395	D142595	D142825	D143075A	D143365	D150075A	D150495	
D142405	D142595A	D142865	D143085	D143365A	D150135	D150495A	