

30.12.2015

**Avviso urgente di sicurezza,
Flight 60T, FSCA SN-1115-16
Sostituzione di batterie**

Nome del dispositivo interessato: Flight 60
Numero di catalogo del dispositivo: V200-000
Numero di serie: Si veda l'elenco di seguito
Codice prodotto: SUB-0222

Descrizione del problema:

Linde Medicale è stata informata dal fabbricante del ventilatore FLIGHT 60T (FLIGHT MEDICAL) in merito alla necessità di sostituzione della batteria interna del ventilatore.

Nei ventilatori Flight 60T, elencati di seguito, contenenti uno specifico lotto di batterie interne, è stato riscontrato che esiste la remota probabilità che, qualora la batteria principale venga rimossa mentre il ventilatore risulta non essere connesso alla corrente elettrica, si verifichi lo spegnimento del dispositivo, con conseguente esposizione del paziente ad un potenziale rischio.

Consigli sulle azioni da intraprendere:

Pur non avendo registrato alcuna segnalazione di incidente, la batteria interna dei ventilatori deve essere sostituita; sarà nostra cura sostituire le batterie. Nessuna azione può essere intrapresa da personale non autorizzato.

Come precauzione si raccomanda di non scollegare il respiratore dalla corrente elettrica fino alla sostituzione della batteria.

Vi invitiamo, in caso di dimissione del Paziente, a contattarci al numero [redacted] ed a non assegnare il ventilatore in vostro utilizzo fino a che non sarà da noi effettuata la sostituzione della batteria.

Preghiamo di inoltrare il presente avviso a tutti gli interessati all'interno della vostra azienda o a chiunque siano stati trasferiti i dispositivi coinvolti.

Referente:

Nome:

Indirizzo:

Azienda:

Linde Medicale S.r.l.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Guido Rossa, 3
I-20010 Arluno (MI)
Telefono +39.02.90373-1
Telefax +39.02.90373-599
www.lindemedicale.it
marketing.medicale@it.linde-gas.com

Società con Socio Unico
Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Linde AG
Cap. Soc. 10.000.000 Euro
P.I. 01550070617
Cod. Fisc. 04411460639
REA MILANO N° 1772901
Iscr. Reg. Impr. MILANO N° 04411460639

Iscr. Reg. AEE N° IT08070000005300
Iscr. Reg. Pile N° IT09120P00002026

Società Certificata
ISO 9001 : 2008
ISO 13485 : 2012

Filiali ed Agenzie in tutta Italia



Tel/Fax:

Email:

L'apposizione della firma conferma che il presente avviso è stato recepito.

Nome:

Firma:

Elenco seriali dei dispositivi coinvolti:

15052973, 15052975, 15052977, 15052978, 15052979, 15052980, 15052981, 15073063, 15073064, 15073065, 15073067, 15073068, 15073069, 15073070, 15073071, 15073072, 15073074, 15073076, 15073077, 15073078, 15073079, 15073082, 15073083, 15073085, 15073086, 15073087, 15073089, 15073091.

Distinti saluti

LINDE MEDICALE S.r.l.



Linde Medicale S.r.l.

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Guido Rossa, 3
I-20010 Arluno (MI)
Telefono +39.02.90373-1
Telefax +39.02.90373-599
www.lindemedicale.it
marketing.medicale@it.linde-gas.com

Società con Socio Unico
Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Linde AG
Cap. Soc. 10.000.000 Euro
P.I. 01550070617
Cod. Fisc. 04411460639
REA MILANO N° 1772901
Iscr. Reg. Impr. MILANO N° 04411460639

Iscr. Reg. AEE N° IT08070000005300
Iscr. Reg. Pile N° IT09120P00002026

Società Certificata
ISO 9001 : 2008
ISO 13485 : 2012

Filiali ed Agenzie in tutta Italia