

Bickland Industrial Park, Falmouth, Cornwall, TR11 4TA,
Regno Unito
Tel.: 01326 372753 [dall'estero +44 1326 372 753]
Fax: 01326 378783 [dall'estero +44 1326 378 783]
e-mail: sales@research-instruments.com
www.research-instruments.com

11 marzo 2016

URGENTE: RITIRO DI DISPOSITIVO MEDICO

Gentile cliente Research Instruments,

la nostra azienda ha in corso il ritiro volontario del cavo di alimentazione del **micromanipolatore Integra 3™**. Dai collaudi interni di Research Instruments è infatti emerso un difetto di lieve entità dei materiali a carico del cavo di alimentazione (2-54-031). La nostra documentazione indica che alcuni prodotti interessati sono stati installati presso la Sua sede.

Il micromanipolatore Integra 3™ è stato progettato per il posizionamento preciso di microstrumenti sotto un microscopio mantenendo costante la temperatura del campione durante tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), quali l'iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI) e l'iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi morfologicamente selezionati (IMSI).

In rari casi, il cavo può causare la mancata alimentazione del comando di riscaldamento di Integra 3, con la conseguente disattivazione della funzione termica. Al fine di ridurre le possibilità di fermo del Suo micromanipolatore Integra 3, raccomandiamo che il cavo di alimentazione venga sostituito entro 3 mesi dalla data della presente. Il Reparto Assistenza di Research Instruments La contatterà a breve per prendere appuntamento ai fini di questa sostituzione. Prevediamo che la correzione richiederà circa 10 minuti, in base all'accessibilità.



Compili l'allegato **Modulo di presa di conoscenza e conferma ricezione** per confermare la ricezione della presente comunicazione. Per qualsiasi domanda o dubbio, rivolgersi all'Assistenza clienti Research Instruments al numero **01326 372 753** o scrivere all'indirizzo di posta elettronica service@research-instruments.com.

Cordiali saluti

John Mitchell
Responsabile Qualità e Salute e Sicurezza