

# CARICATORE MOD. 37751


## ISTRUZIONI PER IL RESET

0056035-18/10/2016-DGDMF-M05-A - Allegato Utente 7 (A07)

# Medtronic

### 1 STRUMENTI NECESSARI

- cacciavite a testa piatta piccola
- graffetta per fogli

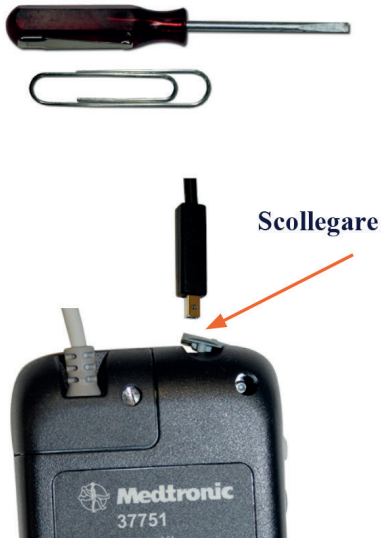


**AVVERTENZA:** Il caricatore deve essere scollegato. Non ripristinare il caricatore mentre è collegato all'alimentatore CA.

### 2 RIMUOVERE LO SPORTELLO



Usare il cacciavite per svitare la vite e rimuovere lo sportello.

### 3 INDIVIDUARE IL PULSANTE DI RESET

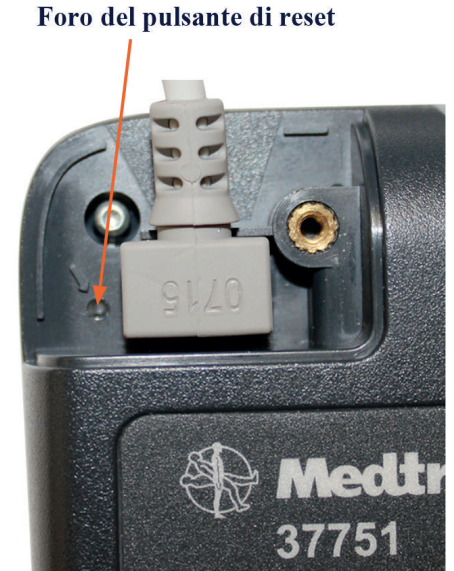


Individuare il foro del pulsante di reset.

### 4 EFFETTUARE IL RESET



Raddrizzare la graffetta. Inserire la graffetta nel foro del pulsante di reset

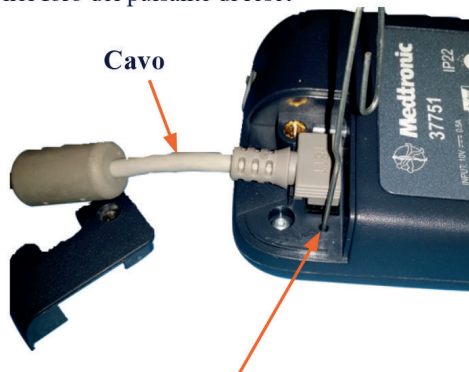

Premere e tenere premuto per 2 secondi il pulsante di reset. Riposizionare lo sportello e stringere la vite.

**Nota:** Assicurarsi che il cavo sia ancora saldamente connesso prima di rimettere lo sportello.

### 5 USCIRE DALLA SCHERMATA



Tasto verde

Il caricatore mostra la schermata di ricarica AC. Premere il tasto verde per uscire dalla schermata

### 6 CONFERMA DEL RESET COMPLETATO



Premere nuovamente il tasto verde per avviare una sessione di ricarica. Se il caricatore non funziona contattare il servizio di assistenza tecnico-applicativa Medtronic DIRECTO (tel. numero verde 800209020 – fax 0224138.235 – email: [directo.italia@medtronic.com](mailto:directo.italia@medtronic.com)).