

Cliente
Ospedale
Città
CAP
Paese
c.a.: XXX

Avviso urgente di sicurezza:
Ricevuta di registrazione ABL800 FLEXQ

Gentile Cliente,

A ottobre 2017 Radiometer ha reso noto la possibilità che, in determinate condizioni, gli analizzatori Serie ABL800 possano interpretare erroneamente il codice a barre della ricevuta di registrazione, dopo che è stato posizionato il dispositivo di prelievo Safe Pico sul modulo FLEXQ.

Potenzialmente potrebbe succedere se il codice a barre è di bassa qualità a causa di un danneggiamento o di un utilizzo improprio o di una qualità scadente di stampa. Il risultato finale, nel peggiore dei casi, potrebbe essere che la ricevuta di registrazione sia associata a un altro campione.

Prodotto interessato:

Analizzatori ABL800 con il modulo FLEXQ installato, con software precedente a V6.18.

Cosa dovete fare:

Nessuna azione, poichè è già stata implementata la contromisura temporanea.

Azione da parte di Radiometer:

Per ridurre il rischio, Radiometer ha installato nell'analizzatore il software versione 6.18.

N.B.:

Qualora non siate l'utente finale del prodotto interessato, Vi preghiamo di fare in modo che la presente lettera sia distribuita all'utilizzatore finale effettivo.

Per qualsiasi domanda o richiesta, Vi preghiamo di contattare A. De Mori S.p.A..

Cordiali saluti,
A. De Mori S.p.A.