

Ai Clienti interessati

Vicopisano, 08.11.2017

**Importante informazione aggiuntiva riguardo il prodotto
Measles IgM ELISA (codice prodotto: 401424).**

Per il lotto 122 del kit Measles IgM ELISA (codice prodotto 401424) sono state osservate reazioni aspecifiche per alcuni sieri di donne in gravidanza; si tratta di donne gravide e donne che desiderano una gravidanza e che abbiano ricevuto dei trattamenti clinici per ottenerla (centri fertilità).

Sulla base dei risultati del lotto 122, reazioni aspecifiche nei sieri individuali non possono essere del tutto escluse.

Per i sieri di donne gravide "normali" il test funziona perfettamente.

Estratto dalla linea guida SK-2 (Germania) per le donne in gravidanza:

Measles IgM talvolta mostra una reazione crociata con altri virus o può essere positiva per una stimolazione policlonale (per esempio, per EBV). Il test Measles IgM pertanto potrebbe mostrare risultati falsi positivi in casi singoli.

Per il 30% IgM è misurabile solo dopo 72 ore dopo i sintomi.

Quindi, si deve sempre controllare se i risultati di laboratorio si adattano al quadro clinico.

Raccomandazione:

Si raccomanda che i clienti, solo in questi casi particolari, facciano un doppio controllo sui risultati, per esempio con RT-PCR o per un aumento delle IgG.

Si raccomanda inoltre di controllare le linee guida italiane specifiche per le donne in gravidanza.

Trasmissione della presente informazione

Vi preghiamo di distribuire, dentro e fuori la Vostra organizzazione, a tutte le persone interessate, la presente informazione.

Vi preghiamo di confermare la ricezione di questa comunicazione, inviando il modulo allegato al seguente numero di fax: 050.879884.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordiali saluti



Il Direttore Tecnico
(Dott. Fabrizio Cacciatore)

Allegato alla Comunicazione: “Importante informazione aggiuntiva riguardo il prodotto Measles IgM ELISA (codice prodotto: 401424)”

Conferma di ricezione dell’importante informazione aggiuntiva sul kit Measles IgM ELISA (codice prodotto 401424)

Si prega di reinoltrare il presente allegato il prima possibile, via fax o e-mail a:
Grifols Italia S.p.A.
Att.ne: Dr. Fabrizio Cacciatore
Fax: 050.879884
E-mail: fabrizio.cacciatore@grifols.com

.....
Confermiamo il recepimento dell’importante informazione aggiuntiva sul kit Measles IgM ELISA lotto 122 (codice prodotto 401424).

Timbro dell’Ospedale/Ente:

Ente/Laboratorio: _____

Persona di riferimento: _____

Data: _____

Firma: _____