

FREI AG Postfach 1231 79196 Kirchzarten

FREI AG

Am Fischerrain 8 | 79199 Kirchzarten
Tel. 076 61 / 93 36 0 | Fax 076 61 / 93 36 50
info@frei-ag.de | www.frei-ag.de

Informazioni di sicurezza urgenti

Controllare la regolazione in altezza e la sede del controdado

Riguardante: tavolo da allenamento ad altezza regolabile FREI AG

Mittente: FREI AG Aktive Reha-Systeme, Am Fischerrain 8, 79199 Kirchzarten, Germany

Destinatario: Proprietario, operatore e distributore del tavolo da allenamento regolabile in altezza

Identificazione dei dispositivi medici interessati:

Tavolo da allenamento mobile e regolabile in altezza di FREI AG - numeri articolo:

6.5550.60
6.5550.70
6.5550.71
6.5550.71a
6.5550.72



Descrizione del problema comprensiva della causa accertata

I prodotti hanno 2 ruote su un lato e 2 regolatori di altezza sull'altro lato. I regolatori di altezza devono essere contrastati, altrimenti possono deformarsi, cadere o piegarsi. I regolatori di altezza non fissati possono causare gravi lesioni.



max. 20 mm tra il bordo superiore del dispositivo di regolazione dell'altezza e il tubo tondo

altezza di regolazione

Controdado DIN 439 M10

pagina 1/2

Quali misure è tenuto ad adottare il destinatario?

Innanzitutto, controllare se il controdado è ancora presente. Nella seconda fase, verificare la distanza dal bordo superiore del regolatore di altezza al tubo tondo (massimo 20 mm).

Nella terza fase, verificare la tenuta del controdado del regolatore di altezza con una chiave fissa o aperta SW17.

Visto dall'alto, viene eseguita la controminazione antioraria. Regolare il tavolo da allenamento orizzontalmente su un terreno piano con i regolatori di altezza e serrare il controdado in questa posizione.

Se i dadi di bloccaggio sono mancanti, si prega di richiederli alla nostra persona di contatto di seguito, indicando il numero di tavoli di allenamento. Se il dispositivo causa un problema, si prega di bloccare questo dispositivo di allenamento per l'uso e di contattarci anche. Per tutte le domande su questa misura siamo a vostra disposizione.

Divulgazione delle informazioni qui fornite:

Assicurati che nella tua organizzazione tutti gli utenti del tavolo di allenamento regolabile in altezza e di altre persone siano informati di questo avviso di sicurezza urgente. Se hai fornito prodotti a terzi, inoltra una copia di queste informazioni o informa la persona di contatto di seguito.

Si prega di conservare queste informazioni almeno fino a quando l'azione è stata completata.

L'Istituto federale per la droga e i dispositivi medici ne ha una copia
Ricevuto "informazioni di sicurezza urgenti".

Persone da contattare in caso di domande:

Signora Natalia Rommel
Natalia.Rommel@frei-ag.de
Consulenza di servizio / assistenza clienti

FREI AG, Aktive Reha-Systeme
Kirchzarten, Germany maggio 2018