



18 febbraio 2020

A: Strutture ospedaliere e chirurghi**Oggetto:** **AVVISO URGENTE RELATIVO ALLA SICUREZZA SUL CAMPO DI DISPOSITIVI MEDICI - RICHIAMO****Riferimento:** ZFA2019-00433**Prodotto:** Steli di ancoraggio Innex

Vedere l'Allegato 2 – Elenco dei prodotti potenzialmente interessati



Figura 1: Confezione danneggiata dello stelo di ancoraggio Innex

In via precauzionale, Zimmer GmbH sta conducendo un'Azione Correttiva di Sicurezza (Richiamo) per dispositivi medici relativa a specifici lotti degli steli di ancoraggio Innex, a causa di potenziali danni alla confezione sterile. L'elenco completo dei lotti potenzialmente interessati è riportato nell'**Allegato 2**.

Il problema è limitato alla specifica configurazione della confezione degli Steli di ancoraggio Innex, che non viene più utilizzata nella produzione dopo l'aggiornamento della confezione implementato alla fine del 2017.

La confezione sterile danneggiata può essere rilevata dall'utilizzatore prima dell'impianto osservando la perdita del vuoto della busta sterile.

| Rischi | | |
|--|--|---|
| Descrivere le conseguenze immediate per la salute (lesioni o patologie) che potrebbero derivare dall'uso del prodotto in questione o dall'esposizione allo stesso. | Alta probabilità | Massima gravità |
| | Prolungamento della durata dell'intervento non clinicamente significativo per trovare un altro prodotto immediatamente disponibile | Prolungamento della durata dell'intervento clinicamente significativo per modificare l'approccio chirurgico |
| Descrivere le conseguenze a lungo termine per la salute (lesioni o patologie) che potrebbero derivare dall'uso del prodotto in questione o dall'esposizione allo stesso. | Alta probabilità | Massima gravità |
| | Nessuno | Infezione e potenziale ulteriore intervento chirurgico |

Secondo la documentazione in nostro possesso, potreste aver ricevuto uno o più dei prodotti potenzialmente interessati. Le unità interessate sono state distribuite tra gennaio 2012 e gennaio 2020 (la distribuzione locale potrebbe variare).

Responsabilità dell'ospedale:

1. Leggere attentamente la presente notifica e accertarsi che il personale interessato sia a conoscenza del relativo contenuto.
2. Se la struttura ospedaliera ha a disposizione i prodotti potenzialmente interessati, fornire ai rappresentanti di vendita di Zimmer Biomet la necessaria assistenza alla messa in quarantena di tutti i prodotti potenzialmente interessati. Il rappresentante Zimmer Biomet collaborerà al ritiro del prodotto in questione dalla struttura interessata.
3. Compilare l'Allegato 1 – Certificato di conferma e inviarlo a fieldaction.italy@zimmerbiomet.com o spedirlo via fax al numero 02 51626240. Il presente modulo deve essere restituito a Zimmer Biomet anche se presso la propria struttura non sono più presenti i prodotti potenzialmente interessati.
4. Conservare una copia del modulo del certificato di conferma negli archivi delle azioni sul campo ai fini di una eventuale verifica di conformità della documentazione presso la propria struttura.
5. Qualora, dopo aver letto il presente avviso, desideriate porre ulteriori domande o abbiate dubbi, contattate il rappresentante di vendita Zimmer Biomet.

Responsabilità del chirurgo:

1. In relazione alla presente azione sul campo non sono raccomandate istruzioni specifiche di monitoraggio dei pazienti oltre il calendario di visite di follow-up già esistente.
2. Compilare l'Allegato 1 – **Certificato di conferma** e inviarlo a fieldaction.italy@zimmerbiomet.com o spedirlo via fax al numero 02 51626240. Il presente modulo deve essere restituito a Zimmer Biomet anche se presso la propria struttura non sono più presenti i prodotti potenzialmente interessati.
3. Conservare una copia del modulo del certificato di conferma negli archivi delle azioni sul campo ai fini di una eventuale verifica di conformità della documentazione presso la propria struttura.

4. Qualora, dopo aver letto il presente avviso, desideriate porre ulteriori domande o abbiate dubbi, contattate il rappresentante di vendita Zimmer Biomet.

Altre informazioni

Il presente avviso relativo alla sicurezza sul campo dei dispositivi medici è stato inoltrato a tutte le necessarie Autorità Competenti e al relativo Organismo Notificato in base a quanto previsto dalle normative per dispositivi medici applicabili, in conformità a MEDDEV 2.12-1 in Europa.

Vi chiediamo di informare Zimmer Biomet di eventuali eventi avversi associati a questo prodotto o ad altri prodotti Zimmer Biomet inviando una e-mail a winterthur.per@zimmerbiomet.com o al referente Zimmer Biomet locale.

La informiamo che secondo la prassi consueta, i nomi delle strutture utilizzatrici che hanno ricevuto le notifiche sono trasmessi alle Autorità Competenti a fini di controllo.

Il sottoscritto conferma che il presente avviso è stato consegnato agli Enti Normativi appropriati. Ringraziamo anticipatamente della gentile collaborazione e ci scusiamo degli eventuali disagi causati dalla presente azione sul campo.

Cordiali saluti



Said Djaouat
VP EMEA QARC

ALLEGATO 1

Certificato di conferma

SI RICHIEDE RISPOSTA IMMEDIATA – SI RICHIEDE UN'AZIONE TEMPESTIVA

Prodotto potenzialmente interessato: Stelo di ancoraggio Innex

Riferimento dell'azione sul campo: ZFA2019-00433

Inviare il modulo **compilato** al proprio referente Zimmer Biomet al seguente indirizzo:
fielddaction.italy@zimmerbiomet.com o via fax al numero 02 51626240

Ho ricevuto e compreso il presente avviso relativo alla sicurezza sul campo.

Per quanto concerne i prodotti:

In base ai controlli effettuati su tutte le scorte dei prodotti interessati devono essere restituiti i seguenti prodotti:

| Codice del prodotto | Numero di lotto | Quantità di prodotti restituiti |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OPPURE

I prodotti potenzialmente interessati non più disponibili per la restituzione sono stati: impiantati smarriti
altro: _____

Apponendo la firma sottostante confermo di aver intrapreso le azioni richieste secondo le specifiche dell'avviso relativo alla sicurezza sul campo.

[] **Struttura ospedaliera** [] **Chirurgo** (*selezioni l'opzione appropriata*)

Nome in stampatello: _____ **Firma:** _____

Data: ___/___/___ **Qualifica:** _____ **Telefono:** _____

Nome della struttura: _____

Indirizzo della struttura: _____ **Città:** _____

CAP: _____ **Paese:** Italia

Nota: Il presente modulo deve essere restituito a Zimmer Biomet prima che questa azione venga conclusa in relazione alla vostra posizione. È importante compilare il presente modulo e inviarne una copia per e-mail a fielddaction.italy@zimmerbiomet.com o via fax al numero 02 51626240

ALLEGATO 2

Elenco dei prodotti potenzialmente interessati

| Codice | Descrizione | Numero di lotto | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |
| 01.02001.435 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 15-65 | 2696127 | 2725243 | 2774093 | 2794055 | 2800151 |
| | | 2808397 | 2825635 | 2853327 | 2871916 | |
| 01.02001.436 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 17-65 | 2707225 | 2763852 | 2780769 | 2784081 | 2795551 |
| | | 2800481 | 2804951 | 2816703 | 2826378 | 2910749 |
| 01.02001.437 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 19-65 | 2788140 | 2794057 | 2798007 | 2800483 | 2802709 |
| | | 2805614 | 2813830 | 2861928 | 2911272 | |
| 01.02001.439 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 19-105 | 2635192 | 2693282 | 2710847 | 2733349 | 2764538 |
| | | 2796424 | 2807365 | 2826380 | 2861221 | 2878394 |
| | | 2890788 | 2911270 | | | |
| 01.02001.443 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 11-65 | 2677102 | 2687923 | 2693284 | 2736796 | 2746550 |
| | | 2770453 | 2826250 | 2855750 | 2871272 | 2886235 |
| 01.02001.444 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 13-65 | 2639965 | 2683424 | 2693286 | 2710500 | 2749196 |
| | | 2759576 | 2774988 | 2796426 | 2813639 | 2837668 |
| | | 2854726 | 2880377 | 2902981 | | |
| 01.02001.445 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 11-105 | 2688539 | 2696129 | 2746552 | 2768770 | 2774990 |
| | | 2792609 | 2806767 | 2806791 | 2820400 | 2829095 |
| | | 2842717 | 2862000 | 2901968 | | |
| 01.02001.446 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 13-105 | 2921985 | 2922282 | 2925251 | 2638733 | 2664591 |
| | | 2677104 | 2687925 | 2696064 | 2716710 | 2729513 |
| | | 2745362 | 2757967 | 2763831 | 2782980 | 2795553 |
| | | 2802501 | 2806773 | 2811396 | 2815531 | 2818780 |
| | | 2839921 | 2842793 | 2855752 | 2875463 | 2879688 |
| | 2911268 | | | | | |
| 01.02001.447 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 15-105 | 2926049 | 2637027 | 2646376 | 2666171 | 2675713 |
| | | 2684959 | 2694665 | 2699776 | 2726304 | 2738821 |
| | | 2752079 | 2759578 | 2763825 | 2768090 | 2779314 |
| | | 2786117 | 2796428 | 2804953 | 2811408 | 2814573 |
| | | 2820402 | 2832066 | 2844673 | 2853329 | 2861223 |
| | 2878396 | 2887299 | 2905302 | | | |
| 01.02001.448 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 17-105 | 2926858 | 2638001 | 2647166 | 2658005 | 2677744 |
| | | 2685752 | 2699779 | 2710849 | 2721287 | 2743015 |
| | | 2752081 | 2759989 | 2764508 | 2772711 | 2785185 |
| | | 2794059 | 2806414 | 2823134 | 2832076 | 2844680 |
| | | 2855754 | 2869736 | 2894467 | 2905304 | |

| Codice | Descrizione | Numero di lotto | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 01.02001.450 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 11-135 | 2632710 | 2690338 | 2710851 | 2719993 | 2729515 |
| | | 2749200 | 2766295 | 2804955 | 2874049 | 2907800 |
| 01.02001.451 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 13-135 | 2664593 | 2685754 | 2711904 | 2750956 | 2758522 |
| | | 2768772 | 2773696 | 2794061 | 2808399 | 2826961 |
| | | 2871274 | | | | |
| 01.02001.452 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 15-135 | 2637025 | 2655206 | 2674580 | 2693288 | 2713468 |
| | | 2757969 | 2766908 | 2780771 | 2794067 | 2804957 |
| | | 2817405 | 2826963 | 2847778 | 2862002 | 2873568 |
| 01.02001.453 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 17-135 | 2646378 | 2664595 | 2693290 | 2722372 | 2746554 |
| | | 2757971 | 2768774 | 2774992 | 2794069 | 2804959 |
| | | 2806966 | 2815533 | 2844682 | 2862004 | |
| 01.02001.454 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 19-135 | 2641271 | 2681332 | 2693292 | 2714879 | 2741986 |
| | | 2768776 | 2778399 | 2800485 | 2816705 | 2871276 |
| | | 2882791 | 2911266 | | | |
| 01.02001.455 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 11-175 | 2921908 | 2660012 | 2674582 | 2675760 | 2703621 |
| | | 2717563 | 2756915 | 2765200 | 2811398 | 2867433 |
| 01.02001.456 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 13-175 | 2690340 | 2696136 | 2749198 | 2755122 | 2782982 |
| | | 2795560 | 2808401 | 2825263 | 2849565 | |
| 01.02001.457 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 15-175 | 2655204 | 2684961 | 2738009 | 2749202 | 2790959 |
| | | 2798206 | 2805451 | 2813832 | 2831195 | 2851394 |
| 01.02001.458 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 17-175 | 2638003 | 2658946 | 2687915 | 2699782 | 2746556 |
| | | 2755346 | 2797500 | 2804961 | 2808404 | 2818782 |
| | | 2898228 | | | | |
| 01.02001.459 | Innex [®] , anchorage stem, straight 0°, uncemented, ø 19-175 | 2658948 | 2687917 | 2725241 | 2795562 | 2797502 |
| | | 2803933 | 2806431 | 2811400 | 2825637 | 2910660 |
| 01.02001.460 | Innex [®] , anchorage stem, 2° angle, uncemented, ø 11-135 | 2703623 | 2749214 | 2829738 | | |
| 01.02001.461 | Innex [®] , anchorage stem, 2° angle, uncemented, ø 13-135 | 2730319 | 2746558 | 2749221 | 2862008 | 2866665 |
| | | 2874354 | | | | |
| 01.02001.462 | Innex [®] , anchorage stem, 2° angle, uncemented, ø 15-135 | 2724503 | 2726306 | 2823708 | | |
| 01.02001.463 | Innex [®] , anchorage stem, 2° angle, uncemented, ø 17-135 | 2730336 | 2726308 | 2749223 | 2862046 | 2886237 |
| 01.02001.464 | Innex [®] , anchorage stem, 2° angle, uncemented, ø 19-135 | 2721289 | 2730338 | 2862050 | | |
| 01.02001.465 | Innex [®] , anchorage stem, 2° angle, uncemented, ø 11-175 | 2699784 | 2729519 | 2752083 | 2862058 | |
| 01.02001.466 | | 2713470 | 2725239 | 2752983 | 2862056 | 2868762 |

| Codice | Descrizione | Numero di lotto | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | Innex [®] , anchorage stem, 2° angle, uncemented, ø 13-175 | 2886239 | | | | |
| 01.02001.467 | Innex [®] , anchorage stem, 2° angle, uncemented, ø 15-175 | 2703625 | 2730340 | 2917985 | | |
| 01.02001.468 | Innex [®] , anchorage stem, 2° angle, uncemented, ø 17-175 | 2729521 | 2764506 | | | |
| 01.02001.469 | Innex [®] , anchorage stem, 2° angle, uncemented, ø 19-175 | 2714881 | 2749204 | 2838941 | | |
| 01.02001.470 | Innex [®] , anchorage stem, conical, uncemented, 50 | 2922036 | 2922037 | 2922038 | 2923746 | 2926859 |
| | | 2929506 | 2632714 | 2635194 | 2635196 | 2637023 |
| | | 2638737 | 2641273 | 2644006 | 2644008 | 2645032 |
| | | 2646380 | 2646382 | 2647168 | 2653021 | 2653023 |
| | | 2653025 | 2655202 | 2655827 | 2656688 | 2661480 |
| | | 2660026 | 2660014 | 2663776 | 2664597 | 2667784 |
| | | 2670525 | 2671473 | 2672377 | 2674576 | 2677761 |
| | | 2679795 | 2681334 | 2682436 | 2684963 | 2684965 |
| | | 2687919 | 2688566 | 2687921 | 2693294 | 2694663 |
| | | 2699789 | 2701307 | 2699786 | 2703617 | 2703615 |
| | | 2706354 | 2710496 | 2706356 | 2710492 | 2710494 |
| | | 2711906 | 2715366 | 2716712 | 2721296 | 2719545 |
| | | 2725235 | 2725237 | 2726310 | 2726312 | 2727798 |
| | | 2729517 | 2732095 | 2734599 | 2736798 | 2738823 |
| | | 2741988 | 2746565 | 2743984 | 2750958 | 2754331 |
| | | 2756917 | 2757973 | 2763011 | 2766297 | 2768778 |
| | | 2774095 | 2776747 | 2778401 | 2780777 | 2784083 |
| | | 2789128 | 2790963 | 2794063 | 2796430 | 2798208 |
| | | 2800487 | 2802503 | 2804963 | 2806433 | 2808411 |
| | | 2811402 | 2817825 | 2821084 | 2826382 | 2828652 |
| | | 2831197 | 2833876 | 2839923 | 2836683 | 2842715 |
| 2844684 | 2848845 | 2847784 | 2852164 | 2850387 | | |
| 2855761 | 2858557 | 2860770 | 2863177 | 2866277 | | |
| 2868984 | 2872511 | 2874352 | 2873571 | 2877082 | | |
| 2880950 | 2884726 | 2886589 | 2888661 | 2890493 | | |
| 2892356 | 2894464 | 2897086 | 2899372 | 2901407 | | |
| 2905316 | 2903927 | 2907802 | 2910761 | 2911264 | | |

| Codice | Descrizione | Numero di lotto | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 01.02001.471 | Innex®, anchorage stem, conical, uncemented, 100 | 2926509 | 2632716 | 2634112 | 2638735 | 2645034 |
| | | 2650943 | 2653027 | 2670527 | 2674578 | 2678785 |
| | | 2685756 | 2693296 | 2699791 | 2710502 | 2718334 |
| | | 2727198 | 2741023 | 2743991 | 2752085 | 2755124 |
| | | 2759580 | 2767916 | 2774994 | 2782984 | 2790965 |
| | | 2798215 | 2804965 | 2807368 | 2815535 | 2820404 |
| | | 2829320 | 2833874 | 2842713 | 2850389 | 2857964 |
| | | 2865202 | 2871918 | 2873573 | 2877746 | 2883633 |
| | | | | 2891267 | 2897049 | 2907393 |
| 01.02001.475 | Innex®, anchorage stem, offset O3, uncemented, ø 11-105 | 2666173 | 2688089 | 2694661 | 2719547 | 2756921 |
| | | 2768780 | 2780779 | 2793162 | 2798217 | 2807370 |
| | | 2821086 | 2854728 | 2909219 | | |
| 01.02001.476 | Innex®, anchorage stem, offset O3, uncemented, ø 13-105 | 2915544 | 2648379 | 2655829 | 2671475 | 2684967 |
| | | 2693207 | 2706482 | 2710508 | 2727200 | 2736805 |
| | | 2746567 | 2763827 | 2774097 | 2785187 | 2795571 |
| | | 2802505 | 2808413 | 2825639 | 2849567 | 2868665 |
| | | | 2879690 | 2903929 | | |
| 01.02001.477 | Innex®, anchorage stem, offset O4.5, uncemented, ø 15-105 | 2632178 | 2639963 | 2650950 | 2670529 | 2673965 |
| | | 2687927 | 2687929 | 2696066 | 2710510 | 2726314 |
| | | 2741025 | 2755348 | 2766910 | 2777238 | 2800489 |
| | | 2807372 | 2815537 | 2824223 | 2845497 | 2853331 |
| | | | 2863179 | 2871920 | 2892358 | 2911262 |
| 01.02001.478 | Innex®, anchorage stem, offset O4.5, uncemented, ø 17-105 | 2638005 | 2648381 | 2653043 | 2681336 | 2696138 |
| | | 2732097 | 2741990 | 2749206 | 2757975 | 2774099 |
| | | 2790091 | 2807376 | 2824985 | 2842711 | 2853333 |
| | | | 2867032 | 2892360 | | |
| 01.02001.480 | Innex®, anchorage stem, offset O3, uncemented, ø 11-135 | 2639961 | 2685758 | 2706468 | 2754329 | 2766912 |
| | | 2793164 | 2804967 | 2845499 | 2852160 | 2874350 |
| 01.02001.481 | Innex®, anchorage stem, offset O3, uncemented, ø 13-135 | 2663778 | 2666175 | 2693298 | 2716714 | 2749208 |
| | | 2763013 | 2780773 | 2796432 | 2800153 | 2807142 |
| | | 2816061 | 2825210 | 2832996 | 2868029 | 2873764 |
| 01.02001.482 | Innex®, anchorage stem, offset O3, uncemented, ø 15-135 | 2632718 | 2649441 | 2658950 | 2674574 | 2690342 |
| | | 2733351 | 2743993 | 2768794 | 2780775 | 2799546 |
| | | 2807381 | 2842795 | 2860772 | 2874348 | 2913635 |
| 01.02001.483 | Innex®, anchorage stem, offset O3, uncemented, ø 17-135 | 2632643 | 2644010 | 2649443 | 2662390 | 2699794 |
| | | 2743017 | 2763829 | 2795573 | 2807383 | 2826384 |
| | | 2851308 | 2887693 | 2911260 | | |

| Codice | Descrizione | Numero di lotto | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |
| 01.02001.484 | Innex®, anchorage stem, offset O4.5, uncemented, ø 15-135 | 2638007 | 2646384 | 2653045 | 2688568 | 2696068 |
| | | 2725232 | 2756919 | 2776749 | 2797504 | 2815539 |
| | | 2826965 | 2851310 | 2871922 | 2898226 | |
| 01.02001.485 | Innex®, anchorage stem, offset O4.5, uncemented, ø 17-135 | 2632185 | 2662392 | 2662394 | 2688091 | 2694659 |
| | | 2725230 | 2759582 | 2793167 | 2808420 | 2830905 |
| | | 2866279 | 2878398 | 2913633 | | |
| 01.02001.486 | Innex®, anchorage stem, offset O4.5, uncemented, ø 19-135 | 2644012 | 2653047 | 2690344 | 2696070 | 2719549 |
| | | 2746569 | 2797521 | 2823129 | 2847788 | 2868066 |
| | | 2879692 | 2915049 | | | |
| 01.02001.487 | Innex®, anchorage stem, offset O6, uncemented, ø 19-135 | 2693300 | 2706617 | 2725245 | 2749210 | 2769443 |
| | | 2815541 | 2834714 | 2851312 | 2886247 | |
| 01.02001.488 | Innex®, anchorage stem, offset O3, uncemented, ø 15-105 | 2915595 | 2638009 | 2646386 | 2649445 | 2654318 |
| | | 2660028 | 2674572 | 2684969 | 2699796 | 2710498 |
| | | 2716716 | 2725247 | 2757977 | 2741027 | 2768782 |
| | | 2774996 | 2789298 | 2797523 | 2807385 | 2820406 |
| | | 2824987 | 2845501 | 2857985 | 2868987 | 2879694 |
| | | 2907804 | | | | |
| 01.02001.489 | Innex®, anchorage stem, offset O3, uncemented, ø 17-105 | 2632645 | 2646388 | 2649447 | 2662401 | 2678781 |
| | | 2688570 | 2703627 | 2716718 | 2726316 | 2741992 |
| | | 2746571 | 2761490 | 2772713 | 2795580 | 2808422 |
| | | 2826967 | 2839925 | 2854730 | 2871278 | 2905924 |
| 01.02001.490 | Innex®, anchorage stem, offset O3, uncemented, ø 19-105 | 2641275 | 2658007 | 2699798 | 2755350 | 2774101 |
| | | 2798219 | 2806440 | 2825641 | 2852153 | 2862006 |
| | | 2892362 | 2915051 | | | |
| 01.02001.491 | Innex®, anchorage stem, offset O3, uncemented, ø 19-135 | 2637021 | 2660030 | 2675762 | 2699800 | 2743019 |
| | | 2769535 | 2789310 | 2803656 | 2820408 | 2833871 |
| | | 2868989 | 2898224 | | | |
| 01.02001.492 | Innex®, anchorage stem, offset O4.5, uncemented, ø 11-105 | 2632647 | 2646390 | 2684971 | 2706470 | 2725249 |
| | | 2745364 | 2757979 | 2770967 | 2794065 | 2812471 |
| | | 2823711 | 2856853 | 2886241 | 2905914 | |
| 01.02001.493 | Innex®, anchorage stem, offset O4.5, uncemented, ø 13-105 | 2632187 | 2639959 | 2649449 | 2664599 | 2677106 |
| | | 2696072 | 2710504 | 2721298 | 2735128 | 2757981 |
| | | 2768784 | 2789312 | 2801389 | 2814575 | 2824225 |
| | | 2851314 | 2867034 | 2872499 | 2886243 | 2911258 |
| 01.02001.494 | Innex®, anchorage stem, offset O4.5, uncemented, ø 19-105 | 2644014 | 2664601 | 2690351 | 2715368 | 2746573 |
| | | 2774998 | 2790967 | 2804969 | 2823713 | 2835730 |
| | | 2887691 | | | | |
| 01.02001.495 | | 2703629 | 2757983 | 2772715 | 2801391 | 2804971 |

| Codice | Descrizione | Numero di lotto | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | Innex [®] , anchorage stem, offset O4.5, uncemented, ø 11-135 | 2815543 | 2823716 | 2868741 | | |
| 01.02001.496 | Innex [®] , anchorage stem, offset O4.5, uncemented, ø 13-135 | 2641277 | 2649451 | 2690353 | 2706472 | 2745366 |
| | | 2763015 | 2775000 | 2796434 | 2807387 | 2817403 |
| | | 2852151 | 2886245 | 2911256 | | |
| 01.02001.497 | Innex [®] , anchorage stem, offset O6, uncemented, ø 11-135 | 2724297 | 2746575 | 2759584 | 2789130 | 2796870 |
| | | 2804973 | 2814577 | 2824227 | 2829736 | |
| 01.02001.498 | Innex [®] , anchorage stem, offset O6, uncemented, ø 13-135 | 2672379 | 2685760 | 2710506 | 2726318 | 2744000 |
| | | 2799548 | 2811404 | 2833868 | 2878603 | 2892364 |
| 01.02001.499 | Innex [®] , anchorage stem, offset O6, uncemented, ø 15-135 | 2641279 | 2699802 | 2749212 | 2777240 | 2807390 |
| | | 2815545 | 2824229 | 2845503 | 2871924 | |
| 01.02001.500 | Innex [®] , anchorage stem, offset O6, uncemented, ø 17-135 | 2716720 | 2766914 | 2801393 | 2818587 | 2829322 |
| | | 2872497 | | | | |