

## INTEGRAZIONE AVVISO DI SICUREZZA

(Segnalazione di Set per Trasfusione Sanguie)


### Avviso di Sicurezza / n. 02-2010

Gentile Cliente,


ad integrazione del precedente Avviso di Sicurezza n. 01-2010 inviatovi e pubblicato sul sito del Ministero della Salute in data 08.04.2010 con numero di riferimento 2010-10527 e relativo al dispositivo **Set per Trasfusione Sanguie** - Fabbricante: Anchiplast snc riguardante il possibile distacco del raccordo terminale para (in gomma) durante la procedura di infusione ed in particolare se utilizzato con dispositivi premi-sacca,

vi consigliamo di seguire, prima dell'utilizzo a scopo preventivo, le azioni di seguito riportate:

1. Controllare prima dell'utilizzo che il connettore in gomma sia inserito correttamente ed applicare una trazione di 2 cm per circa 4 secondi fra il connettore in gomma ed il luer lock come da foto riportate di seguito:

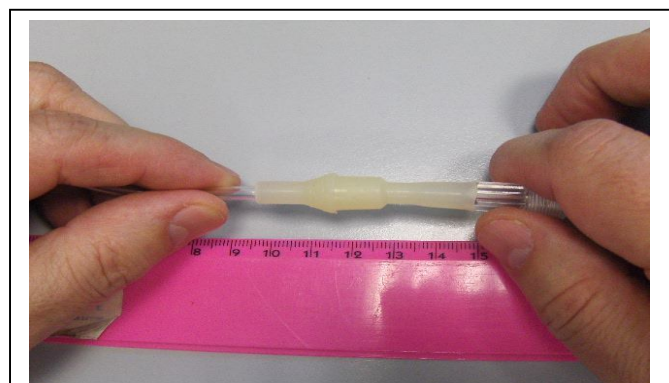

NORMALE

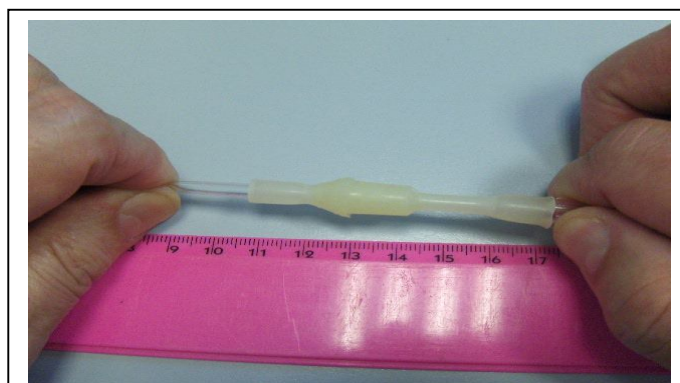

IN TRAZIONE

2. Non utilizzare il set per trasfusione sanguie con dispositivi premi sacca o simili che mettono in pressione il set.
3. Evitare di mettere in tensione il set

In caso di distacco avisare tempestivamente il distributore o il fabbricante.

**Dettagli dei dispositivi coinvolti:** Sono stati segnalati dei casi di distacco del raccordo terminale para (in gomma) sui lotti di Set per Trasfusione Sangue riportati nella Tabella 1.

**Tabella 1: Lotti Set per Trasfusione Sangue difettosi**

REF. ANCHIPLAST	COD. FRESENIUS	LOTTO
3003	A1AA0010	08151
3003	A1AA0010	09321
3002	A1AA0020	09322
3103	A1AA0070	09323
3003	A1AA0010	09338
3002	A1AA0020	09339
3103	A1AA0070	09340
3151	A1AA0090	09342
3101	A1AA0080	10019
3011	A1AA0030	10034

**Fabbricante:** Anchiplast Srl via Briana, 4 Bondeno di Gonzaga (MN)

Dott. Renzo Coronati Cell. 335-6088956 E-mail: info@coronaticonsulting.it

Sig. Marco Anceschi tel. 0376-54571 Fax. 0376-54578 E-mail: marco.anceschi@anchiplast.it

**Distributore:** Fresenius Kabi Italia S.r.l Via Camagre, 41 37063 Isola della Scala (VR).