

CG/lkb 31.07.2020

Avviso di sicurezza urgente Recall precauzionale

Avviso di sicurezza urgente

Recall precauzionale-sul prodotto "Setpack compressa di garza con filo di bario" dovuto a rottura e sfilacciamento del filo di bario Cod. Articolo 15100, 15101, 15102, 15106, 15107, 15108, 15110, 15114 con RDM 104003/R.

Egredi Signori,

In data odierna vi informiamo in merito ad un recall precauzionale delle compresse di garza dovuto ad una possibile rottura del filo di bario utilizzato.

In allegato i codici e relativo lotto interessati.

A seguito della segnalazione di alcuni clienti in Europa è stato notato che, sotto tensione, il filo di bario può rompersi e sfilacciarsi in singoli punti.

Teoricamente, piccoli pezzi di filo potrebbero staccarsi quando il filo di bario si rompe o si sfilaccia. Ciò potrebbe, ad esempio, portare all'infiammazione e / o alla formazione di granuloma quando questi pezzi rimangono nel corpo.

Vi preghiamo cortesemente di accertarvi che all'interno della vostra struttura tutti gli utilizzatori dei prodotti elencati di seguito e le persone interessate siano informati di questo Avviso di Sicurezza Urgente e di provvedere alla restituzione dell'allegato debitamente compilato e sottoscritto per conferma.

Se avete consegnato i prodotti a terzi, vogliate cortesemente provvedere all'inoltro agli stessi di una copia del presente avviso di sicurezza.

Tutti i prodotti presenti nei nostri magazzini sono stati posti in quarantena. Tutti i clienti ai quali è stato consegnato l'articolo e il lotto coinvolti sono stati informati.

I prodotti interessati oggetto del presente recall saranno restituiti e sostituiti /rimborsati con nota di accredito

Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione e ci scusiamo per eventuali disagi.

Cordiali saluti.

Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG
Un Procuratore
Responsabile della Vigilanza



Claudio Guerra

Allegato: avviso di sicurezza urgente, Recall precauzionale su prodotto dovuto a rottura e sfilacciamento nelle compresse di garza con filo di bario Setpack

Lohmann & Rauscher s.r.l.
Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Lohmann & Rauscher
GmbH & Co. KG
Cap. Soc. € 600.000 int. vers.
N° Iscriz. Registro Imprese
Tribunale di Pd 00207810284
P.I. 00207810284

Via Enrico Fermi 4
35030 Rubano (Pd)

Tel.: 049 7446600
Fax: 049 7446699

info@it.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.it

Allegato 1

Avviso di Sicurezza urgente!

31.07.2020

(restituire a mezzo fax: 049 744 66 99 o mail info@it.lrmed.com)

Mittente: Lohmann & Rauscher s.r.l.
Via E.Fermi, 4
35030 Sarameola di Rubano (PD)

Destinatario:

E tutti gli utilizzatori dei summenzionati prodotti

Descrizione: avviso di sicurezza urgente, Recall
sul prodotto compresse di garza con filo di bario Setpack
dovuto a rottura e sfilacciamento del filo di bario

Il nostro Product Specialist di zona, Sig..... (cell.), sarà a vostra completa disposizione.

Azioni correttive:

Vi chiediamo di non utilizzare le suddette compresse di garza con filo di bario.

Vogliate cortesemente informare di questo Avviso di Sicurezza tutti i vostri dipendenti che utilizzano questi prodotti e confermare che non utilizzate le compresse di garza con filo di bario contenute nei sets procedurali.

Il sottoscritto conferma (per favore sbarrare):

- [...] che non utilizza i Setpack indicati
- [...] che informa tutte le persone interessate su questa importante comunicazione sui summenzionati prodotti,
- [...] che non detiene i prodotti sopra elencati,
- [...] che non ha dato i summenzionati prodotti a terzi
- [...] che ha informato i terzi, se hanno ricevuto da parte sua i prodotti summenzionati, in merito alle informazioni di sicurezza e non utilizzo dei Setpack indicato
- [...] che i prodotti interessati ancora in suo possesso saranno restituiti a Lohmann & Rauscher Italia S.r.L.

Per la procedura di reso per favore contattare:

Servizio Clienti

Tel.: 049 7446650

ServizioClienti@it.lrmed.com

Per cortesia compilare la seguente tabella con i prodotti a stock e le relative quantità:

Art.	Prodotto	Numero di lotto	Quantità di prodotti Restituiti

Data / firma:

Nome in stampatello:

Ruolo:

Reparto/ Struttura:

Telefono e mail:

garza, 16 strati, 17 fili con filo RX

Codice	Lotto
15100	19264A09HY
	19314A09HY
15101	19217A09HZ
	19227A09HZ
	19243A09HZ
	19256A09HZ
	19274A09HZ
	19284A09HZ
	19314A09HZ
	19323A09HZ
	19333A09HZ
	19345A09HZ
	19351A09HZ
	19393A09HZ
	19394A09HZ
	19405A09HZ
	19446A09HZ
	19454A09HZ
	19457A09HZ
	19462A09HZ
	19471A09HZ
	19472A09HZ
19473A09HZ	
19474A09HZ	
20013A09HZ	
20035A09HZ	
20097A09HZ	
15102	19264A09IA
	19327A09IA
	19352A09IA
	20012A09IA
	20035A09IA
15106	19171A09IE
	19181A09IE
	19193A09IE
	19217A09IE
	19227A09IE
	19234A09IE
	19274A09IE
	19284A09IE
	19305A09IE
	19314A09IE
	19323A09IE
	19462A09IE
	19474A09IE
	19521A09IE
	20012A09IE
20013A09IE	
15107	19234A09IF
	19284A09IF
	19323A09IF
	19333A09IF
	19345A09IF
	19377A09IF
	19394A09IF
	19411A09IF
	20012A09IF
	20035A09IF
20036A09IF	
15108	19232A09IG
15110	19274A09II
	19314A09II
	20036A09II
15114	19266A09IL
	19326A09IL
	19352A09IL