

Modulo siringa BD Alaris™: siringhe compatibili e rispettivi intervalli di velocità

AVVERTENZA

Non usare misure e modelli di siringa non compatibili con il modulo siringa. L'uso di siringhe non compatibili può influire sul funzionamento della pompa con conseguente erogazione inaccurata di fluidi, ritardo nella generazione di allarmi di occlusione e altri potenziali problemi.

Nella seguente tabella sono riportate le siringhe compatibili, con le rispettive misure, i rispettivi intervalli di velocità e numeri d'ordine.

Misure	BD	Monoject™ Covidien	Terumo™	Intervallo di velocità
1 ml	309628	n/a	n/a	0,01–30 ml/h
3 ml	309657	Solo confezione morbida 1180300777	SS-03L	0,01–100 ml/h
5 ml	309646	n/a	SS-05L (6 ml in totale)	0,1–150 ml/h
6 ml	n/a	Confezione morbida 1180600777 Confezione rigida 8881516937	n/a	0,1–150 ml/h
10 ml	300912	n/a	SS-10L (12 ml in totale)	0,1–250 ml/h
12 ml	n/a	Confezione morbida 1181200777 Confezione morbida 1181200777T Confezione rigida 8881512878	n/a	0,1–250 ml/h
20 ml	302830	Confezione morbida 1182000777 Confezione rigida 8881520657	SS-20L2 (25 ml in totale)	0,1-500 ml/h
30 ml	302832	n/a	SS-30L (35 ml in totale)	0,1–650 ml/h
35 ml	n/a	Confezione morbida 1183500777 Confezione rigida 8881535762	n/a	0,1–650 ml/h
50 ml	309653	n/a	n/a	0,1–999 ml/h
60 ml	n/a	Confezione morbida 1186000777 Confezione morbida 1186000777T Confezione rigida 8881560125	SS-60L	0,1–999 ml/h

Modulo PCA Alaris™: siringhe compatibili

AVVERTENZA

Usare solo siringhe luer lock e set di infusione standard progettati per l'uso con pompe PCA a siringa. Assicurarsi che le dimensioni e i modelli della siringa siano compatibili con il modulo PCA. L'uso di siringhe non compatibili può influire sul funzionamento della pompa con conseguente erogazione inaccurata di fluidi, ritardo nella generazione di allarmi di occlusione e altri potenziali problemi.

Nella seguente tabella sono riportate le siringhe compatibili con le rispettive dimensioni e i numeri d'ordine.

Misura	BD	Covidien Monoject™	Terumo™	IMS Pump Jet
20 ml	302830	Confezione morbida 1182000777 Confezione rigida 8881520657	SS-20L2 (25 ml in totale)	n/a
30 ml	302832	n/a	SS-30L (35 ml in totale)	NDC n. 76329-1911-1†
35 ml	n/a	Confezione morbida 1183500777 Confezione rigida 8881535762 Versione a stantuffo removibile, cilindro vuoto 8881135609‡	n/a	n/a
50 ml	309653	n/a	n/a	n/a
60 ml	n/a	Confezione morbida 1186000777 Confezione morbida 1186000777T Confezione rigida 8881560125	SS-60L	n/a

† Preriempita con 1 mg/ml di morfina solfato.

‡ Cilindro vuoto venduto solo da BD. Con il set di infusione viene fornito uno stantuffo staccabile. Può anche essere a marchio Cardinal Health Monoject™

