



**AVVISO URGENTE
PER LA SICUREZZA NEL SITO**

GE Healthcare

Healthcare Systems
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
USA

Rif. interno GE Healthcare: FMI 10889

15 gennaio 2014

A: Amministratori ospedalieri - Responsabili clinici dei rischi
Responsabili di Radiologia - Cardiologia
Radiologi - Cardiologi

RIF: **Sistemi di imaging a raggi X Precision 500D, Precision MPI e Precision RXI - Potenziale punto debole del sostegno del monitor video LCD a soffitto (monitor singolo e monitor doppio).**

GE Healthcare è venuta recentemente a conoscenza di un potenziale problema di sicurezza relativo al sostegno del monitor video LCD da soffitto. **Si raccomanda pertanto di comunicare a tutti i potenziali utenti presenti nella propria struttura sia il presente avviso, sia le relative azioni correttive raccomandate.**

Problema di sicurezza Esiste la possibilità che il dado di blocco si allenti e fuoriesca dalla banda di sostegno del monitor video LCD. Ciò non causa la caduta immediata del monitor sospeso dal momento che questo viene mantenuto in posizione dalla boccola e dalla vite in assenza del dado di blocco. Ad oggi, non è stata riportata nessuna lesione dovuta a questo problema.

Istruzioni per la sicurezza Se si osservano prestazioni non corrette o un movimento eccessivo della banda di sospensione del monitor, contattare immediatamente il Rappresentante dell'assistenza locale di GE Healthcare.

Dettagli del prodotto in questione Sistemi di imaging a raggi X Precision 500D, Precision MPI & Precision RXI dotati di sospensione del monitor video LCD - numeri di modello 2385123, 2385125, 2385123-2 e 2385125-2 prodotti da GE Healthcare.

Correzione prodotti GE Healthcare apporterà le dovute modifiche senza addebitare alcun costo aggiuntivo al cliente. Per l'implementazione della correzione, un rappresentante dell'assistenza GE Healthcare provvederà a mettersi in contatto con l'utente.

Informazioni di contatto In caso di domande riguardanti questa azione correttiva 'sul campo' o le modalità di identificazione dei dispositivi coinvolti, contattate pure il vostro referente locale delle funzioni di vendita e/o assistenza tecnica.

Potete anche contattare il Supporto Tecnico di riferimento al numero :

Italia:

Nord Ovest: T. 800827164 opz.2 - Fax 800014110

Nord Est: T. 800827166 opz. 2 - Fax 800917292

Centro + Sardegna: T. 800827168 opz. 2 - Fax 800917293

Sud: T. 800827170 opz. 2 - Fax 800917294

email: ServiceCentreMilanOffice@ge.com

Svizzera: 0800 55 69 58

GE Healthcare vi conferma che questo avviso è già stato comunicato al Ministero competente.

Il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e qualità è la nostra massima priorità. Per eventuali domande, contattare immediatamente GE Healthcare.

Cordiali saluti,

James Dennison
Vice President QARA
GE Healthcare Systems

Douglas M. Hansell, M.D., MPH
Chief Medical Officer
GE Healthcare