Via Enrico Cialdini, 16 20161 Milano Tel. 02 48240.1 Fax 02 48.20.5248 www.bd.com/it/



Spett. ICOT GIOMI Via Franco Faggiana 1668 04100 Latina (LT)

## URGENTE AVVISO DI SICUREZZA

## 15 Febbraio 2016

Nome	Codice	Unità	Numero di lotto	Data di scadenza
BD SurePath™ GYN	490527	500 ea.	Fare riferimento alla lista allegata	
Preservative Collection Vial				o una nsta anegata
Kit				
BD Surepath <sup>TM</sup> Collection Vial	490505	100 ea.		
Replacement Cap				
BD Kit PrepMate™	491288	1 ea.		
Installation	2000 - 10			

Egr. Cliente,

BD ha confermato che una percentuale dei vials di raccolta BD SurePath<sup>TM</sup>, con specifici numeri di lotto, può contenere tappi che sono spaccati. Questa spaccatura può condurre alla fuoriuscita del liquido di conservazione.

Come riportato nelle istruzioni per l'uso, si raccomanda d'indossare indumenti protettivi adatti, guanti, e protezioni facciali/oculari e seguire appropriate precauzioni per il rischio biologico durante la manipolazione di tutti i campioni, dato che la perdita dai tappi può aumentare il rischio di esposizione al rischio chimico e biologico. I campioni citologici possono contenere agenti infettivi.

I nostri archivi hanno evidenziato che potreste aver ricevuto il prodotto con i numeri di lotto coinvolti. Vi preghiamo di non utilizzare tali numeri di lotto e di procedere con l'eliminazione di eventuali confezioni rimaste, secondo le pratiche standard di laboratorio. Vi invieremo il reintegro per il materiale eliminato.

Per eventuali chiarimenti Vi preghiamo di far riferimento al Rappresentante di zona BD.

Vi preghiamo gentilmente di compilare e di rispedire il form allegato nel caso in cui abbiate o non abbiate una rimanenza a magazzino, in modo che possiamo avere conferma della ricezione di questa comunicazione. Il form compilato deve inviato al fax 02 48202668 o all'indirizzo E-mail roberto pozzi@bd.com.

Becton Dickinson Italia S.p.A. - Società a socio unico sotto la direzione di Becton Dickinson Europe Holdings SAS - Francia

INTESA SANPAOLO IBAN IT42 Q 03069 09400 000026954150 CITIBANK IBAN IT60 X 03566 01600 000101551105

CITIBANK IBAN IT60 X 03566 01600 000101551105 UNICREDIT IBAN IT27 K 02008 09434 000004684740

Capitale sociale € 4.320.000 Interamente versato

Codice fiscale e partita IVA e registro imprese di Milano n. 00803890151

Registro AEE IT 8030000004302 - Registro Pile IT 10020P00002096 - REA Milano n. 819437





Ci scusiamo per ogni inconveniente che possiamo aver creato al Vostro laboratorio. BD continua ad impegnarsi a fornire prodotti con una qualità ad alto livello.

Vi ringraziamo del Vostro continuo supporto

RobertoPozzi

Regulatory Affairs & Quality Manager

Nome	Codice	Numero di lotto	Data di scadenza	
Surepath Collection Vial Replacement Cap	490505	5068841	N/A	
		5083935	N/A	
		5117561	N/A	
		5148682	N/A	
		5148969	N/A	
		5058537	20180228	
		5062884	20180228	
		5072995	20180331	
		5077993	20180331	
		5091595	20180331	
	490527	5092812	20180331	
		5096907	20180430	
		5111748	20180430	
		5114611	20180430	
SurePath GYN		5118509	20180430	
Preservative Collection		5119815	20180430	
Vial Kit		5124528	20180430	
v lai Kit		5132801	20180531	
		5135799	20180531	
		5139714	20180531	
		5141835	20180531	
		5155636	20180630	
		5159991	20180630	
		5160987	20180630	
		5162962	20180630	
		5224627	20180831	
		5229676	20180831	
	**	5230761	20180831	
Kit PrepMate Installation	491288	5016715	20161231	



Fax to: 02 48202668

Email: roberto\_pozzi@bd.com

## SI PREGA DI RENDERE QUESTO FORM COMPILATO A CONFERMA DELLA RICEZIONE DI QUESTO AVVISO

Azienda:		
Indirizzo:		
Città:	Stato:	
Persona di riferimento:		
Telefono:	Fax.:	

## Numero totale di <u>vials</u> eliminate da reintegrare:

Nome	Codice	Unità	Numero di lotto	Data di scadenza
BD SurePath <sup>TM</sup> Preservative Collection Vial	490527	500 ea.		
BD Surepath <sup>TM</sup> Collection Vial Replacement Cap	490505	100 ea.		
BD Kit PrepMate™ Installation	491288	1ea.		