

UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2016SISTEMI DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATI

Johnson & Johnson
MEDICAL S.P.A.

INDIRIZZO OSPEDALE

Pomezia, 18 Ottobre 2018

**AVVISO DI SICUREZZA URGENTE (RICHIAMO) relativo alle
Brocche di Prova con aggancio Femmina CORAIL® (MISURE 9-20)**

Nome Prodotto: Brocche di Prova con aggancio Femmina CORAIL®

Identificativo-FSCA: PIE - 1280215

Tipo di Azione: Avviso di Sicurezza (Richiamo)

Alla c.a. di: Direttore Sanitario
Responsabile della Vigilanza dei Dispositivi Medici

DePuy France SAS sta emettendo un Avviso di Sicurezza relativo a tutti i lotti prodotti prima del design del 2010 per i codici prodotto delle Brocche di Prova con aggancio femmina CORAIL® L93209, L93210, L93211, L93212, L93213, L93214, L93215, L93216, L93218, L93220 (Brocche di Prova con aggancio femmina CORAIL® misure 9-20).

Recentemente sono stati ricevuti dei reclami relativi ad una mancata corrispondenza tra le Brocche di Prova con aggancio femmina e gli impianti, potenzialmente risultanti in fratture ossee intra-operatorie, scarsa meccanica articolare (discrepanze nella lunghezza delle gambe) o ritardi chirurgici.



Nome del dispositivo: Brocche di Prova con aggancio femmina CORAIL® (Vedi Figura 1).

Tipo di dispositivo: la broccia viene utilizzata per rimuovere l'osso spongioso e produrre una cavità femorale per lo stelo da impiantare. Questa viene anche utilizzata per la prova con i colletti e testine di prova.

Fig 1. Broccia di Prova con aggancio Femmina CORAIL®

**AVVISO DI SICUREZZA URGENTE (RICHIAMO) relativo alle
Brocche di Prova con aggancio Femmina CORAIL® (MISURE 9-20)**

Sede legale: Via del Mare, 56, 00071 Pomezia (RM) Tel. +39 06 911941 Fax +39 06 91194290
Sedi operative: Via del Mare, 56, 00071 Pomezia (RM) Tel. +39 06 911941 Fax +39 06 91194290 – Via M. Buonarroti, 23, 20093 Cologno Monzese (MI) Tel. +39 02 647421 Fax +39 02 6439330
Cap. Soc. €6.000.000,00 i.v. con socio unico REA 1072108 N° iscr. Reg. Impr. Roma / C.F. / P.I. 08082461008
N° Iscrizione Registro A.E.E. IT08020000000224 N° Iscrizione Registro Nazionale Pile IT09060P00000270

Dispositivi coinvolti:

I Codici Prodotto L93209, L93210, L93211, L93212, L93213, L93214, L93215, L93216, L93218, L93220 (Brocche di Prova Con aggancio femmina Corail® Misure 9-20)- Tutti i Lotti prima del cambio di design del 2010 – vedi Tabella 1 sotto e Allegato 1 per i codici e numeri di Lotto.

Tabella 1

| Codice Prodotto | Numero di Lotto | Numero GTIN | Descrizione del Prodotto |
|-----------------|-----------------|----------------|---|
| L93209 | Vedi Allegato 1 | 10603295373469 | Broccia di Prova con aggancio femmina misura 9 |
| L93210 | Vedi Allegato 1 | 10603295373476 | Broccia di Prova con aggancio femmina misura 10 |
| L93211 | Vedi Allegato 1 | 10603295373483 | Broccia di Prova con aggancio femmina misura 11 |
| L93212 | Vedi Allegato 1 | 10603295373490 | Broccia di Prova con aggancio femmina misura 12 |
| L93213 | Vedi Allegato 1 | 10603295373506 | Broccia di Prova con aggancio femmina misura 13 |
| L93214 | Vedi Allegato 1 | 10603295373513 | Broccia di Prova con aggancio femmina misura 14 |
| L93215 | Vedi Allegato 1 | 10603295373520 | Broccia di Prova con aggancio femmina misura 15 |
| L93216 | Vedi Allegato 1 | 10603295373537 | Broccia di Prova con aggancio femmina misura 16 |
| L93218 | Vedi Allegato 1 | 10603295373544 | Broccia di Prova con aggancio femmina misura 18 |
| L93220 | Vedi Allegato 1 | 10603295260721 | Broccia di Prova con aggancio femmina misura 20 |

Implicazioni Cliniche e impatto sul Paziente:

Potenziati danni identificati:

- Scarsa meccanica delle articolazioni (discrepanza della lunghezza degli arti)
- Frattura ossea Intra-Operatoria, Importante
- Ritardo chirurgico, Significativo

DePuy France SAS non raccomanda la revisione profilattica in assenza di sintomi. L'azienda raccomanda ai chirurghi di discutere le potenziali implicazioni cliniche e i rischi con i pazienti sintomatici su cui sono stati utilizzati i dispositivi coinvolti (brocche).

Azioni da intraprendere:

Si prega di intraprendere le seguenti azioni urgenti:

1. Leggere attentamente questo Avviso di Sicurezza,
2. Si prega di cessare immediatamente l'utilizzo dei dispositivi coinvolti,
3. Esaminare immediatamente le Vostre giacenze per determinare se siete in possesso dei prodotti coinvolti e rimuovere i prodotti coinvolti non utilizzati in modo da assicurare che questi non vengano utilizzati.
4. Leggere, completare, firmare e restituire il Modulo di Richiamo (Allegato B), al più presto e comunque entro tre (3) giorni dal ricevimento della presente, anche nell'eventualità che non abbiate in giacenza nessun prodotto interessato, al seguente contatto:

Johnson & Johnson Medical S.p.A.
Servizio Clienti
c. a. Sig.ra Maria Grazia Distefano
fax: 06-91194505
e-mail: cservice@its.jnj.com

5. Assicurarsi che il presente Avviso venga attentamente letto da tutto il personale della Vostra struttura coinvolto nell'Avviso e condividerlo con il personale di altre strutture a cui il prodotto potrebbe essere stato trasferito;
6. Conservare una copia di questo Avviso di Sicurezza e del Modulo di Richiamo;

Siete stati informati di questo avviso di sicurezza perchè i nostri dati indicano che avete ricevuto il prodotto coinvolto. Questo avviso deve essere condiviso con tutti coloro che necessitano di venirne a conoscenza all'interno della vostra struttura.

Una volta che la procedura di cui sopra sarà stata completata e dopo il ricevimento del Modulo di Richiamo, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. provvederà a contattarVi e a concordare con Voi le modalità di ritiro. Solo in caso di restituzione di unità di prodotto vendute, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. emetterà nota di credito per i prodotti restituiti. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che questo Avviso potrà causarVi e apprezziamo la Vs. Collaborazione con le nostre richieste.

Per eventuali domande riguardanti questo Avviso è possibile rivolgersi allo Specialista di Prodotto di Zona.

Vi comunichiamo che il Ministero della Salute Italiano è già stato debitamente informato sul presente Avviso.

Cordiali Saluti,

Allegato 1: Lista codici e lotti coinvolti

Allegato 2: Modulo di Richiamo



Giovanni Giorgi

Amministratore Delegato
DePuy Synthes Franchise
Johnson & Johnson Medical

| Codice Prodotto | Lotto | Codice Prodotto | Lotto | Codice Prodotto | Lotto |
|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| L93215 | 514764 | L93210 | 555488 | L93211 | 621247 |
| L93213 | 555458 | L93211 | 555500 | L93209 | 621235 |
| L93214 | 555459 | L93213 | 555491 | L93210 | 621241 |
| L93215 | 555460 | L93214 | 555503 | L93214 | 644180 |
| L93211 | 555454 | L93215 | 555504 | L93216 | 621273 |
| L93212 | 555456 | L93218 | 555486D1 | L93220 | 630555D2 |
| L93218 | 555462 | L93211 | 542595 | L93220 | 630555 |
| L93209 | 555448 | L93211 | 555489 | L93209 | 644152 |
| L93210 | 555453 | L93212 | 542600 | L93212 | 644155 |
| L93209 | 555464 | L93212 | 555501 | L93213 | 644147 |
| L93210 | 555466 | L93212 | 555490 | L93209 | 644143 |
| L93211 | 555467 | L93209 | 542585 | L93210 | 644144 |
| L93212 | 555480 | L93210 | 542590 | L93210 | 644153 |
| L93212 | 555468 | L93216 | 542620 | L93211 | 644145 |
| L93213 | 555469 | L93216 | 555495D1 | L93211 | 644154 |
| L93213 | 555481D1 | L93218 | 555506D1 | L93212 | 644146 |
| L93216 | 555484 | L93209 | 555497 | L93214 | 644148 |
| L93216 | 555473D1 | L93211 | 555479D2 | L93215 | 644149 |
| L93213 | 555481 | L93213 | 555502 | L93216 | 644150 |
| L93209 | 555487D1 | L93215 | 555494D2 | L93218 | 644151 |
| L93209 | 555477D1 | L93218 | 555496 | L93216 | 644159 |
| L93214 | 555470D1 | L93210 | 555499 | L93213 | 644156 |
| L93215 | 555472 | L93213 | 542605 | L93218 | 644160 |
| L93216 | 555505 | L93216 | 611395 | L93214 | 644157 |
| L93218 | 555506 | L93218 | 611396 | L93215 | 644158 |
| L93214 | 555470 | L93211 | 555479 | L93216 | 645519 |
| L93214 | 555482D1 | L93218 | 555486 | L93209 | 645510 |
| L93215 | 555483 | L93214 | 555482 | L93210 | 645511 |
| L93215 | 555483D1 | L93210 | 555478 | L93212 | 645514 |
| L93216 | 555473 | L93215 | 555494 | L93213 | 645516 |
| L93209 | 555487D2 | L93220 | 630555D1 | L93214 | 621263 |
| L93211 | 555479D1 | L93209 | 555487 | L93211 | 645513 |
| L93211 | 555467D1 | L93218 | 555474 | L93215 | 645518 |
| L93214 | 555493 | L93214 | 542610 | L93218 | 659958 |
| L93216 | 555495 | L93215 | 569261 | L93209 | 371262R1 |
| L93216 | 555495D2 | L93218 | 577602 | L93215 | 359688R1 |

| Codice Prodotto | Lotto | Codice Prodotto | Lotto | Codice Prodotto | Lotto |
|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| L93220 | 713094 | L93210 | 734673 | L93215 | 346706R1 |
| L93209 | 313054R1 | L93210 | 752362 | L93216 | 359689R2 |
| L93211 | 336768R1 | L93213 | 752365 | L93218 | 346708R1 |
| L93212 | 326834R1 | L93214 | 752366 | L93213 | 768179d1 |
| L93212 | 336769R1 | L93215 | 752367 | L93213 | 768179 |
| L93213 | 313058R1 | L93218 | 754041 | L93209 | 768171d1 |
| L93214 | 298259R1 | L93211 | 752363 | L93209 | 768171 |
| L93214 | 334470R1 | L93212 | 752364 | L93213 | 768180 |
| L93215 | 274087R1 | L93209 | 752361D1 | L93213 | 768180d1 |
| L93216 | 371269R1 | L93212 | 758444 | L93214 | 768181d1 |
| L93216 | 359689R1 | L93209 | 758438 | L93215 | 768183 |
| L93209 | 716956 | L93210 | 758440 | L93216 | 768186 |
| L93215 | 716963 | L93216 | 758452 | L93220 | 870392 |
| L93218 | 716965 | L93216 | 754040 | L93210 | 768173 |
| L93216 | 716964 | L93218 | 758454 | L93218 | 768187d1 |
| L93211 | 716959 | L93211 | 758442 | L93211 | 768175 |
| L93212 | 716960 | L93213 | 758446 | L93211 | 768175d1 |
| L93210 | 716958 | L93214 | 758448 | L93212 | 768177 |
| L93213 | 716961 | L93215 | 758450 | L93214 | 768181 |
| L93214 | 716962 | L93215 | 758451 | L93216 | 768185d1 |
| L93218 | 728866 | L93220 | 757699 | L93216 | 768185 |
| L93210 | 765546 | L93209 | 752361 | L93218 | 768187 |
| L93211 | 765547 | L93209 | 758439 | L93212 | 768177d1 |
| L93213 | 765549 | L93216 | 758453 | L93215 | 768184 |
| L93214 | 765550 | L93211 | 758443 | L93210 | 768174 |
| L93209 | 765545 | L93212 | 758445 | L93213 | 784178 |
| L93212 | 765548 | L93213 | 758447 | L93214 | 768182 |
| L93215 | 765551 | L93214 | 758449 | L93209 | 768172 |
| L93216 | 765552 | L93218 | 758455 | L93209 | 784170 |
| L93214 | 734677 | L93220 | 762776 | L93212 | 768178 |
| L93215 | 734678 | L93210 | 758441 | L93211 | 793264 |
| L93216 | 734679 | L93220 | 713094R1 | L93211 | 768176 |
| L93211 | 734674 | L93218 | 758454R1 | L93210 | 784172 |
| L93209 | 734672 | L93212 | 298257R1 | L93212 | 784176 |
| L93212 | 734675 | L93211 | 346702R1 | L93214 | 784180 |
| L93213 | 734676 | L93213 | 371266R2 | L93218 | 784186 |

| Codice Prodotto | Lotto | Codice Prodotto | Lotto | Codice Prodotto | Lotto |
|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|
| L93218 | 768188 | L93213 | 901744 | L93213 | 912002 |
| L93220 | 859382 | L93213 | 911993 | L93218 | 911997 |
| L93216 | 784184 | L93213 | 893757 | L93220 | 894088 |
| L93220 | 877748 | L93214 | 901757 | L93220 | 870855 |
| L93209 | 877739 | L93214 | 911994 | L93209 | 945670 |
| L93212 | 877742 | L93215 | 893759 | L93209 | 901761 |
| L93214 | 877744 | L93215 | 901746 | L93209 | 945654 |
| L93215 | 877745d1 | L93215 | 901758 | L93211 | 945672 |
| L93216 | 877746 | L93216 | 893760 | L93211 | 945658 |
| L93218 | 877747 | L93209 | 911980 | L93212 | 945660 |
| L93210 | 877740 | L93209 | 911989 | L93210 | 945657 |
| L93211 | 877741 | L93209 | 901751 | L93214 | 901766 |
| L93213 | 877743 | L93209 | 911998 | L93210 | 945671 |
| L93220 | 894087 | L93210 | 911999 | L93210 | 901762 |
| L93211 | 901753 | L93210 | 911990 | L93212 | 945673 |
| L93209 | 893753 | L93211 | 912000 | L93213 | 945661 |
| L93210 | 901741 | L93212 | 911983 | L93215 | 945694 |
| L93210 | 911981 | L93213 | 911984 | L93216 | 901768 |
| L93210 | 893754 | L93214 | 901745 | L93218 | 945666 |
| L93210 | 901752 | L93214 | 912003 | L93213 | 901765 |
| L93211 | 911982 | L93215 | 911995 | L93209 | 945679 |
| L93212 | 901743 | L93215 | 912004 | L93210 | 945680 |
| L93214 | 911985 | L93216 | 912005 | L93218 | 945687 |
| L93214 | 893758 | L93216 | 901759 | L93212 | 945682 |
| L93215 | 911986 | L93218 | 901760 | L93213 | 945674 |
| L93216 | 911987 | L93218 | 911988 | L93213 | 945683 |
| L93216 | 911996 | L93218 | 912006 | L93214 | 945662 |
| L93216 | 901747 | L93218 | 911997d1 | L93218 | 901769 |
| L93218 | 901748 | L93220 | 894088d1 | L93220 | 979741 |
| L93209 | 901739 | L93220 | 894122 | L93220 | 994935 |
| L93211 | 893755 | L93211 | 901763 | L93212 | 901764 |
| L93211 | 901742 | L93212 | 901755 | L93211 | 945681 |
| L93211 | 911991 | L93215 | 901767 | L93213 | 982873 |
| L93212 | 912001 | L93213 | 901756 | L93213 | 982863 |
| L93212 | 911992 | L93218 | 893761 | L93214 | 982864 |
| L93212 | 893756 | L93215 | 877745 | L93220 | 982878 |

| Codice Prodotto | Lotto | Codice Prodotto | Lotto | Codice Prodotto | Lotto |
|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| L93210 | 982870 | L93212 | 1104555 | L93216 | 1101190 |
| L93215 | 982875 | L93214 | 1104557 | L93209 | 1129306 |
| L93218 | 982867 | L93215 | 1104558 | L93209 | 1132567d |
| L93216 | 982876 | L93216 | 1063102 | L93210 | 1077511 |
| L93214 | 982874 | L93218 | 1104560 | L93210 | 1129307 |
| L93218 | 982877 | L93220 | 1104561 | L93214 | 1132572d |
| L93214 | 945675 | L93218 | 1063103 | L93214 | 1101188 |
| L93215 | 982865 | L93213 | 1104556 | L93215 | 1101189 |
| L93216 | 945695 | L93220 | 1100993 | L93218 | 1101191 |
| L93220 | 982879 | L93209 | 1077507 | L93211 | 1129308 |
| L93209 | 982859 | L93209 | 1063095 | L93211 | 1132569 |
| L93210 | 982860 | L93210 | 1063096 | L93213 | 1101187 |
| L93211 | 982861 | L93211 | 1063097 | L93213 | 1132571 |
| L93212 | 982862 | L93214 | 1063100d | L93215 | 1129312 |
| L93214 | 945684 | L93215 | 1063101 | L93216 | 1129313 |
| L93209 | 982868 | L93209 | 1101183 | L93213 | 1129310 |
| L93212 | 982872 | L93214 | 1063100 | L93214 | 1129311 |
| L93216 | 982866 | L93209 | 1146354 | L93216 | 1132574d |
| L93211 | 982871 | L93212 | 1146357 | L93218 | 1129314d |
| L93214 | 982874d1 | L93213 | 1146358 | L93210 | 1132568 |
| L93215 | 982875d1 | L93213 | 1063099 | L93212 | 1132570 |
| L93218 | 982877d1 | L93214 | 1146359 | L93218 | 1132575 |
| L93210 | 1006016 | L93215 | 1146360 | L93209 | 1132567 |
| L93212 | 1006018 | L93216 | 1146361 | L93216 | 1224608 |
| L93213 | 1006019 | L93220 | 1100997 | L93213 | 1224605 |
| L93215 | 1006021 | L93210 | 1101184 | L93214 | 1224606 |
| L93216 | 1006023 | L93212 | 1077513 | L93215 | 1224607 |
| L93218 | 1006024 | L93215 | 1084168 | L93210 | 1224602 |
| L93209 | 1006015 | L93218 | 1077516 | L93209 | 1224601 |
| L93211 | 1006017 | L93216 | 1077515 | L93211 | 1224603 |
| L93214 | 1006020 | L93220 | 1129317 | L93212 | 1224604 |
| L93220 | 1006026 | L93212 | 1101186 | L93218 | 1250115 |
| L93209 | 1104552 | L93215 | 1132573 | L93213 | 1250111 |
| L93216 | 1104559 | L93216 | 1132574 | L93213 | 1250111e |
| L93210 | 1104553 | L93211 | 1101185 | L93215 | 1250113d |
| L93211 | 1104554 | L93212 | 1129309 | L93215 | 1250113 |

| Codice Prodotto | Lotto | Codice Prodotto | Lotto | Codice Prodotto | Lotto |
|-----------------|----------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| L93218 | 1250115d | L93215 | 1358923 | L93210 | 1545148 |
| L93212 | 1250110 | L93220 | 1391123 | L93212 | 1545150 |
| L93214 | 1250112d | L93211 | 1358920 | L93220 | 1280067 |
| L93214 | 1250112 | L93218 | 1358925 | L93210 | 1583884 |
| L93216 | 1250114 | L93214 | 1358922 | L93209 | 1629025 |
| L93216 | 1250114d | L93210 | 1358919 | L93209 | 1583882 |
| L93210 | 1250108 | L93213 | 1358921 | L93212 | 1583886 |
| L93210 | 1267416 | L93211 | 1422513 | L93211 | 1583885 |
| L93212 | 1250110d | L93213 | 1422515 | L93213 | 1583887 |
| L93209 | 1250107 | L93212 | 1422514 | L93214 | 1583888 |
| L93211 | 1250109 | L93210 | 1422512 | L93216 | 1583890 |
| L93213 | 1250111d | L93209 | 1422511 | L93215 | 1583889 |
| L93218 | 1267423 | L93215 | 1422517 | L93218 | 1583891 |
| L93213 | 1250111f | L93214 | 1422516 | L93220 | 1757456 |
| L93218 | 1267423d | L93212 | 1422537 | L93214 | 1629030 |
| L93209 | 1267415d | L93213 | 1422538 | L93211 | 1629027 |
| L93209 | 1250107d | L93214 | 1422539 | L93213 | 1629029 |
| L93210 | 1250108d | L93215 | 1422540 | L93215 | 1629031 |
| L93210 | 1267416d | L93216 | 1422541 | L93212 | 1629028 |
| L93211 | 1267417 | L93216 | 1422518 | L93209 | 1654462 |
| L93220 | 1358939 | L93218 | 1422542 | L93216 | 1629032 |
| L93213 | 1267419 | L93220 | 1413621 | L93210 | 1629026 |
| L93216 | 1267422 | L93211 | 1422536 | L93220 | 1224248 |
| L93214 | 1267420 | L93209 | 1422534 | L93220 | 1224247 |
| L93214 | 1339184 | L93211 | 1534881 | L93218 | 1629033 |
| L93212 | 1267418 | L93212 | 1534882 | L93212 | 1654465 |
| L93213 | 1339183 | L93210 | 1422535 | L93210 | 1654463 |
| L93215 | 1267421 | L93220 | 1280066 | L93211 | 1654464 |
| L93211 | 1339181 | L93218 | 1545155 | L93213 | 1654466 |
| L93209 | 1339179 | L93214 | 1545152 | L93214 | 1654467 |
| L93210 | 1339180 | L93220 | 1638877 | L93216 | 1654469 |
| L93212 | 1339182 | L93209 | 1545147 | L93214 | 1909886 |
| L93215 | 1339185 | L93215 | 1545153 | L93215 | 1909887 |
| L93216 | 1339186 | L93211 | 1545149 | L93216 | 1909888 |
| L93218 | 1339187 | L93216 | 1545154 | L93214 | 5020606 |
| L93209 | 1358918 | L93213 | 1545151 | L93215 | 5020607 |
| | | L93218 | 5020609 | L93216 | 5020608 |

Allegato 2: Modulo di Richiamo

Questo modulo conferma la ricezione dell'Avviso di Sicurezza relativo alle Brocche di Prova con aggancio femmina CORAIL®, identificativo FSCA: PIE-1280215.

Si prega di scegliere le appropriate azioni sotto riportate:

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

Si, Ho ricevuto l'Avviso di Sicurezza

NON abbiamo alcun prodotto coinvolto da restituire.

Si, ne sono in possesso/ restituirò i prodotti coinvolti.

Si prega di elencare il Codice prodotto, il numero di Lotto e la Quantità di dispositivi coinvolti da restituire:

| Codice prodotto | Numero di lotto | Quantità i |
|-----------------|-----------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Abbiamo letto e compreso l'Avviso di Sicurezza e conserveremo una copia di questa lettera

Nome _____

Firma _____

Titolo _____

Ospedale _____

Indirizzo _____

Città

Stato

CAP

Numero di telefono o indirizzo email: _____

Vi chiediamo di rispondere tempestivamente a questo Avviso di Sicurezza, compilando il presente Modulo entro tre (3) giorni dal ricevimento, anche nell'eventualità che non abbiate prodotti coinvolti e poi di inviarlo via fax o e-mail al seguente contatto:

Johnson & Johnson Medical S.p.A.

Servizio Clienti

c. a. Sig.ra Maria Grazia Distefano

fax: 06-91194505

e-mail: cservice@its.jnj.com

Nota: se il Modulo di Ricezione risponde a nome di più di una struttura e/o individuo, si prega di indicare chiaramente il nome e l'indirizzo della struttura e/o individuo in questa pagina della Notifica.

Firmando confermate di aver compreso la Notifica in oggetto e di averlo trasmesso a tutti i Presidi / Reparti interessati.

NEL CASO IN CUI ABBIATE PRODOTTO DA RESTITUIRE, VI PREGHIAMO DI COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE:

LUOGO DI RITIRO DEL MATERIALE RICHIAMATO

FARMACIA/MAGAZZINO/SALA OPERATORIA: _____

VIA _____ **CITTÀ'** _____ **PROV.** _____

PERSONA INCARICATA PER LA RESTITUZIONE DEL MATERIALE

NOMINATIVO _____ **TELEFONO** _____

QUANTITÀ TOTALE DA RESTITUIRE: _____ **UNITÀ**

NB: una copia del presente modulo dovrà accompagnare i prodotti restituiti.

Restituire tutte le pagine del presente modulo