

A tutti i clienti e gli utilizzatori di Fabius con uscita ausiliaria del gas comune (ACGO)

**Etichetta aggiuntiva apparecchio – uscita est. gas freschi / uscita ausiliaria del gas comune**

Settembre 2018

Egregi Signori, Gentili Signore,

facciamo seguito all'Avvertenza di sicurezza emessa da Dräger a ottobre 2017, che segnalava che in alcuni casi l'uscita esterna dei gas freschi / l'uscita ausiliaria del gas comune delle stazioni per anestesia non sono state utilizzate in base alle istruzioni per l'uso. Di conseguenza Dräger ha illustrato il principio di funzionamento dei sistemi di rirespirazione e ha nuovamente sottolineato le linee guida per un utilizzo sicuro dell'uscita esterna dei gas freschi / dell'uscita ausiliaria del gas comune dei macchinari per anestesia Fabius già riportate nelle istruzioni per l'uso.

Inoltre abbiamo già manifestato la nostra intenzione di creare un'etichetta distinta per l'apparecchio come ulteriore promemoria per il controllo dell'impostazione del percorso dei gas freschi quando si inizia una ventilazione meccanica o ManSpont, (quindi quando si utilizza il sistema di rirespirazione COSY) come indicato nella prima lettera.

La nuova etichetta e un supplemento alle Istruzioni per l'uso sono allegati alla presente lettera. L'etichetta consiste in una parte/descrizione grafica e testuale ed è stata studiata per essere applicata al pannello di controllo del ventilatore vicino ai tasti per la selezione delle modalità di ventilazione. È disponibile un'etichetta per ciascuna variante di uscita dei gas freschi.

**Variante Uscita esterna gas freschi**

**Uscita esterna gas freschi  
con interruttore supplementare**


*Descrizione nelle  
Istruzioni per l'uso*

Quando si utilizza una modalità di ventilazione automatica (Controllo volume, Controllo pressione, Supporto pressione, SIMV/PS) o ManSpont,

...collegare il tubo corto dei gas freschi all'uscita esterna dei gas freschi.

...impostare l'interruttore sull'uscita esterna dei gas freschi nella posizione COSY.

*Etichetta*

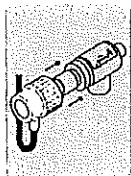

Selezionate l'etichetta che si adatta alla configurazione del vostro apparecchio e la lingua e applicare entrambe al pannello di controllo del ventilatore in base alle istruzioni riportate sull'adesivo.

Per qualsiasi domanda non esitate a contattare il riferimento locale di Dräger.

Cordiali saluti  
Alexander Herden  
Product Management Life Support Systems Anesthesiology

Allegato:

- Etichette per entrambe le varianti dell'uscita esterna dei gas freschi
- Supplemento alle Istruzioni per l'uso