

PROCEDURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)¹

COME INDOSSARE I DPI (MASCHERA FACCIALE TIPO FFP2/FFP3)

1. Igienizzare le mani con acqua e sapone o gel disinfettante
2. Tenere il DPI in mano con lo stringinaso verso le dita, lasciando gli elastici liberi sotto la mano
3. Indossare il DPI con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto, coprendo naso bocca e mento
4. In base al modello, posizionare il laccio inferiore intorno al collo al di sotto delle orecchie e l'elastico superiore sulla nuca oppure posizionare gli elastici attorno alle orecchie
5. Premere e modellare la parte flessibile del DPI con le mani per farla aderire, riducendo al minimo gli spazi tra il naso e la maschera
6. Verificare la corretta aderenza del DPI posando le mani pulite sulla maschera, inspirando e trattenendo per 5/10 secondi l'aria: se la maschera si ripiega leggermente verso l'interno allora il respiratore è posizionato correttamente
7. Se l'esito della verifica è negativo, ricominciare dal punto 2.

COME TOGLIERE I DPI

1. Evitare di toccare con le mani la maschera, che potrebbe essere contaminata
2. Tenere la maschera per gli elastici sui bordi e sganciarli da dietro le orecchie
3. Gettare la maschera **nei contenitori dei rifiuti per l'indifferenziata, messi a disposizione dall'Amministrazione**: non disperdere nell'ambiente
4. Igienizzare le mani

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=oU4stQgCtV8>, Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
<https://www.osha.gov/coronavirus>



ULTERIORI PRECAUZIONI

Se si indossa il DPI mantenere, comunque, la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Se non si indossa il DPI, tenerlo lontano dal viso: durante l'utilizzo, infatti, non è consigliato rimuoverlo dalla bocca, abbassarlo sul mento, ad esempio per mangiare, bere o fumare una sigaretta, poiché se il DPI è infetto si rischia che il virus penetri nel corpo attraverso la bocca o il naso, aumentando il rischio di trasferire il virus dalle mani alla bocca (quindi infettarsi) o dalla bocca alle mani (quindi infettare).

Non toccare il DPI con le mani durante l'utilizzo per evitare di contaminarlo.

Fare attenzione ai bordi di tenuta se si ha barba, basette e baffi: può essere inficiata la capacità filtrante del dispositivo di protezione.

SMALTIMENTO DPI

Smaltire i DPI negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati, messi a disposizione dall'Amministrazione.

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE.
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.



Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.



Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.



Posizionare l'elastico superiore sulla nuca.
Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.

NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o borse lunghe che non permettano il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.



Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso.
Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità.
Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.



La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.

- Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione
- Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova.