

All'attenzione del responsabile della
Vigilanza sui dispositivi medici /
Farmacia centrale

Saint Priest, 11 aprile 2025

URGENTE - AVVISO DI SICUREZZA - RICHIAMO

**Perforatore monouso CODMAN® 14 mm (rif. 26-1221) e kit per craniotomia
CODMAN® contenente perforatore monouso 14 mm, lama per craniotomia,
trapano passafilo (rif. 26-1230)**

Produttore autorizzato:

INTEGRA LIFESCIENCES PRODUCTION CORPORATION - 11 Cabot Boulevard - Mansfield,
MA 02048 USA - SRN: US-MF-000009189

Rappresentante CE:

INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES (France) SAS - Immeuble Séquoia 2 - 97 Allée Alexandre
Borodine - 69800 SAINT PRIEST, France - SRN : FR-AR-000002474

Dispositivo medico:

il perforatore monouso CODMAN® è un dispositivo monouso. Si tratta di un perforatore monouso con un'estremità Hudson ed è disponibile in tre formati contraddistinti con un codice colore: 14 mm (blu) - n. di catalogo 26-1221 11 mm (verde) - n. di catalogo 26-1222 9 mm (giallo) - n. di catalogo 26-1223.

Il kit per craniotomia n. di catalogo 26-1230 contiene perforatore monouso 26-1221, lama per craniotomia, trapano passafilo.

Scopo clinico primario del dispositivo:

Il perforatore monouso CODMAN® viene utilizzato per la perforazione del cranio. Il perforatore è stato progettato in modo che, se usato correttamente, si disimpegni automaticamente a perforazione ultimata e quando non viene più esercitata pressione sulla punta.

Riferimento interessato:

26-1221 (uguale a 261221) - lotti prodotti tra il 27/07/2022 e il 12/07/2024
26-1230 (uguale a 261230) - lotti prodotti tra il 24/05/2023 e il 28/05/2024

Gentile cliente di Integra,

Integra LifeSciences sta distribuendo volontariamente questo avviso di sicurezza per il richiamo del **perforatore monouso CODMAN® da 14 mm** elencato nella Tabella 1.

Durante un'indagine condotta su alcuni reclami, Integra LifeSciences ha identificato l'esistenza di una saldatura inadatta (saldatura sporgente) su lotti specifici di perforatori monouso CODMAN® da 14 mm che può potenzialmente causare lo smontaggio accidentale (rottura/separazione) del prodotto durante l'uso.

Tabella 1: Informazioni sul prodotto

Numero di prodotto del produttore (n. di catalogo)	Nome del prodotto (descrizione)	Numero UDI	Numero di lotto (GG-MM-AA)	Data di scadenza (GG-MM-AA)
26-1221	Perforatore monouso CODMAN® da 14 mm	10381780513599	Numeri di lotto con date di produzione comprese tra il 27/07/2022 e il 12/07/2024	Dal 30/06/2027 al 30/06/2029
26-1230	Kit per craniotomia CODMAN® contenente perforatore monouso, lama per cranio, trapano passafilo da 14 mm	10381780513629	Numeri di lotto con date di produzione comprese tra il 24/05/2023 e il 28/05/2024	Dal 30/04/2028 al 30/04/2029

Nota: i lotti interessati sono stati distribuiti tra il 5 luglio 2023 e il 27 settembre 2024. Sono interessati solo lotti specifici distribuiti in questo intervallo di date. L'elenco completo dei numeri di lotto interessati è disponibile nel file Excel allegato (Appendice 3).

Sulla base dell'indagine, è stato possibile concludere che sono interessati solo i dispositivi indicati nella Tabella 1. Al processo di fabbricazione sono state quindi apportate le necessarie modifiche per evitare saldature inadatte e tutti i nuovi prodotti distribuiti al di fuori dei lotti interessati sono stati sottoposti al processo di fabbricazione corretto.

Rischi per la salute

Il perforatore può smontarsi accidentalmente prima, durante o dopo la craniotomia nei dispositivi con saldature inadatte. Se si smonta accidentalmente, possono verificarsi le seguenti condizioni.

- Prima della procedura: può provocare dei disagi all'utente e rendere più lunga la durata della procedura.
- In fase d'uso: se si elimina la pressione verso il basso o se il trapano esterno si incastra nell'osso cranico, potrebbe essere necessario rimuovere il perforatore smontato manualmente o tramite l'impiego di strumenti chirurgici aggiuntivi.
- In fase d'uso: se non si elimina la pressione verso il basso e non si riesce a sganciare, possono verificarsi gravi lesioni al paziente, come la lacerazione durale con emorragia (comprese le lacerazioni del seno sagittale con emorragia).
- Dopo l'uso: una volta rimosso il perforatore dalla craniotomia, lo smontaggio accidentale potrebbe provocare disagi all'utente e prolungare la durata della procedura nel caso in cui si rendano necessarie ulteriori craniotomie.

Se ha già utilizzato i prodotti interessati da questo richiamo e ha seguito le cure operative standard, **non è necessario un ulteriore follow-up del paziente.**

A partire dal 10 febbraio 2025, sono stati segnalati 14 incidenti gravi in Europa e 2 in Gran Bretagna.

Stando ai dati in nostro possesso lei ha ricevuto prodotti da questi lotti.

Azioni da intraprendere da parte dei clienti:

1. **Leggere con attenzione** le informazioni riportate nella presente lettera.
2. Determinare se il prodotto in possesso è soggetto al richiamo.
 - a. Individuare il riferimento e il numero di lotto interessati.
 - b. Vedere l'Appendice 2 di seguito per un esempio di etichetta del prodotto con cui individuare il riferimento e il numero di lotto. I numeri di lotto sono composti da 7 cifre (solo numeri)
 - c. Aprire il file Excel, utilizzare la funzione di ricerca Ctrl+F o utilizzare la freccia a discesa nella parte superiore della colonna, quindi verificare se il numero o i numeri di lotto sono presenti nell'elenco.
3. **Se si possiedono** prodotti interessati:
 - a. Mettere immediatamente in quarantena le unità.
 - b. Selezionare la casella "Possiedo unità interessate" sul modulo di conferma.
 - c. Riportare sul modulo la quantità totale di prodotti interessati e i numeri di lotto in proprio possesso.
4. **Se non si possiede** alcuno dei prodotti interessati, selezionare la casella "Non possiedo le unità interessate".
5. Restituire **il modulo di risposta compilato per e-mail all'indirizzo emea-fsca@integralife.com.**

Con la compilazione di questo modulo, lei conferma di avere ricevuto il presente Avviso di sicurezza e accetta di rispettare pienamente i termini in esso contenuti. **La preghiamo di fornirci una risposta entro 3 settimane.** Con tale modulo, lei conferma inoltre di avere inoltrato la presente notifica a ogni altro referente della sua organizzazione.
6. Dopo che avrà inviato il modulo, il Servizio clienti di Integra verificherà se lei è in possesso di unità interessate dal richiamo e, in caso affermativo, la contatterà per fornirle un numero RMA (autorizzazione al reso) e le istruzioni dettagliate per la restituzione dei prodotti interessati. Procederemo all'emissione della nota di credito appena riceveremo la merce restituita. Nota: saranno rimborsati solo i prodotti dei lotti interessati che verranno restituiti.
7. Consigliamo di conservare una copia del modulo nella propria documentazione.

INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SI DISPONGA O MENO DEL PRODOTTO INTERESSATO DA RESTITUIRE, È NECESSARIO COMPILARE **UNA CONFERMA DI RICEZIONE**

La ricezione di tale modulo conferma il buon livello di efficacia raggiunto da Integra nella comunicazione di queste informazioni.

Le autorità nazionali competenti possono eseguire revisioni a campione per verificare che i nostri clienti siano stati avvisati e abbiano compreso la natura dell'azione intrapresa.

L'autorità nazionale competente del Paese di competenza è stata allertata in merito a questa azione correttiva.

La ringraziamo per la sua collaborazione nell'implementare questa azione correttiva sul campo e per il suo impegno nel restituirci il modulo di risposta allegato.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, non esiti a contattare il nostro reparto di sorveglianza post-commercializzazione all'indirizzo emea-fsca@integralife.com. La sua collaborazione è molto preziosa e la ringraziamo per il costante supporto.

Cordiali saluti,

Ufficio di sorveglianza post-commercializzazione

Appendice 1: Modulo di risposta dell'avviso di sicurezza (2 pagine)

Appendice 2: Esempio di etichetta del prodotto per riferimento 26-1221. Utilizzare il cerchio rosso sottostante per identificare il numero di lotto

Appendice 3: Elenco dei numeri di lotto interessati (file Excel).

Modulo di risposta per il cliente

1. Informazioni sull'avviso di sicurezza (FSN)	
Numero di riferimento FSN	2024-HHE-022B
Data FSN	11 aprile 2025
Nome del prodotto/dispositivo	Perforatore monouso CODMAN® da 14 mm / Kit per craniotomia CODMAN®
Codici prodotto	26-1221/26-1230
Lotti	Numeri di lotto interessati nell'Appendice 3. (file Excel)

2. Dati del cliente	
Numero dell'account	
Nome dell'organizzazione sanitaria*	
Indirizzo dell'organizzazione*	
Reparto/Unità	
Indirizzo di spedizione se diverso dal precedente	
Nome del referente*	
Titolo o funzione	
Numero di telefono*	
E-mail*	

3. Azione dei clienti intrapresa per conto dell'Organizzazione sanitaria		
☐	Confermo di aver ricevuto l'Avviso di sicurezza e di averne letto e compreso il contenuto.	
☐	Ho eseguito tutte le azioni richieste dall'FSN.	
☐	Le informazioni e le azioni necessarie sono state portate all'attenzione di tutti gli utenti interessati e sono state eseguite.	
☐	<u>Possiedo</u> le unità interessate (inserire il numero di prodotti e il numero di lotto).	
☐	Possiedo le unità interessate e posso distruggerle ⁽¹⁾ (inserire il numero di prodotti e il numero di lotto) ⁽¹⁾ Se si seleziona questa opzione, al ricevimento del modulo di risposta Integra fornirà un certificato di distruzione	
☐	<u>Non possiedo</u> le unità interessate.	
☐	Ho una domanda e vi prego di contattarmi.	Il cliente deve inserire i dati di contatto se diversi da quelli sopra indicati e una breve descrizione della domanda
Nome in stampatello*		Nome in stampatello del cliente qui
Firma*		Firma del cliente qui
Data*		

4. Conferma di restituzione al mittente	
Indirizzo e-mail	emea-fsca@integralife.com
Numero di assistenza per i clienti	+33 (0) 6 30 20 69 66
Indirizzo postale	Ufficio di sorveglianza post-commercializzazione Integra Immeuble Séquoia 2, 97 allée Alexandre Borodine Parc technologique de la Porte des Alpes 69800 Saint Priest, France
Portale web	https://www.integralife.com/
Termine per la restituzione del modulo di risposta del cliente*	02/05/2025

I campi obbligatori sono contrassegnati con *

È importante che la sua organizzazione intraprenda le azioni descritte nell'avviso FSN e confermi la ricezione di detto avviso.

La risposta della sua organizzazione è la prova che ci occorre per monitorare l'andamento delle azioni correttive.

Appendice 2: Esempio di etichetta del prodotto

Riferimento 26-1221. Utilizzare il cerchio rosso sottostante per identificare il numero di lotto

Perforateur jetable
 Einmal-Perforator
 Wegwerp ICP-perforator
 Perforatore monouso
 Perforador desechable
 Perforador descartável

Integra LifeSciences Production Corporation
 11 Cabot Boulevard
 Mansfield, MA 02048 USA

MADE IN USA

U.S. Patent www.integralife.com/patentmarking

(01)10381780513599

(17)YYMMDD(10)SAMPLE

REF 26-1221
LOT SAMPLE

CODMAN® Disposable Perforator

Integra LifeSciences Services (France)
 Immeuble Séquoia 2
 97 Allée Alexandre Borodine
 Parc Technologique de la Porte des Alpes
 69800 Saint Priest - France

EC REP

STERILE R

R Only

QTY 1

14mm

REV. R

CE 2797

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	5580821	31/07/2028
261221	6566289	31/05/2028
261221	7009035	31/07/2028
261230	7062002	31/05/2028
261230	7062006	31/05/2028
261221	7195376	31/03/2029
261221	7195380	30/11/2028
261221	7195380	31/07/2028
261221	7230293	31/07/2028
261221	7230296	31/05/2029
261221	7230296	31/07/2028
261221	7230296	31/10/2028
261221	7230431	31/05/2029
261221	7230431	31/05/2028
261221	7230431	31/05/2028
261221	7230431	31/05/2028
261221	7230439	30/06/2028
261221	7230441	31/05/2028
261221	7230441	31/10/2028
261221	7230442	30/06/2028
261221	7230442	31/07/2028
261221	7230443	31/05/2028
261221	7230443	31/01/2029
261221	7230444	31/05/2029
261221	7230444	31/08/2028
261221	7230444	30/06/2028
261221	7230444	31/05/2028
261221	7230444	31/03/2029
261221	7230445	31/01/2029
261221	7230445	31/01/2029
261221	7230446	31/05/2028
261221	7230446	31/07/2028
261221	7230446	31/07/2028
261221	7230447	30/04/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7230447	31/07/2028
261221	7230448	30/06/2028
261221	7230449	31/12/2028
261221	7230449	30/06/2028
261221	7230449	31/07/2028
261221	7230450	30/11/2028
261221	7230451	30/09/2028
261221	7230451	31/05/2028
261221	7230453	31/08/2028
261221	7230453	31/07/2028
261221	7230453	31/05/2028
261221	7230454	31/05/2028
261221	7230454	31/05/2029
261221	7230455	31/05/2028
261221	7230455	31/05/2028
261221	7230456	30/06/2028
261221	7230456	31/03/2029
261221	7230457	30/06/2028
261221	7230457	31/05/2029
261221	7230457	31/07/2028
261221	7230459	31/05/2029
261221	7230459	31/05/2029
261221	7230460	30/04/2029
261221	7230460	31/05/2029
261221	7230461	31/05/2028
261221	7230461	30/06/2028
261221	7230462	31/05/2028
261221	7230463	30/04/2028
261221	7230464	31/08/2028
261221	7230464	31/05/2028
261221	7230464	31/05/2028
261221	7230466	31/07/2028
261221	7230468	31/10/2028
261221	7230468	30/06/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7230471	30/06/2028
261221	7230472	30/06/2028
261221	7230473	30/06/2028
261221	7230474	30/09/2028
261221	7230476	31/07/2028
261221	7230476	31/05/2028
261221	7230477	30/04/2028
261221	7230478	31/05/2028
261221	7230478	30/06/2028
261221	7230479	31/05/2029
261221	7230480	30/06/2028
261221	7230480	31/05/2029
261221	7230481	31/07/2028
261221	7230481	30/06/2029
261221	7230482	30/04/2028
261221	7230483	30/06/2028
261221	7230483	31/03/2028
261221	7230483	30/06/2028
261221	7230484	30/06/2028
261221	7230484	31/05/2028
261221	7230484	30/06/2028
261221	7230485	30/09/2028
261221	7230486	31/05/2029
261221	7230486	30/04/2028
261221	7230486	31/05/2028
261221	7230488	31/07/2028
261221	7230488	31/05/2029
261221	7230489	30/09/2028
261221	7230490	31/05/2028
261221	7230490	30/06/2028
261221	7230491	31/05/2028
261221	7230492	30/06/2028
261221	7230492	30/06/2028
261221	7230493	31/05/2029

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7230494	31/05/2028
261221	7230495	31/08/2028
261221	7230496	30/06/2028
261221	7230497	31/05/2028
261221	7230498	31/05/2028
261221	7230499	28/02/2029
261221	7230499	31/05/2028
261221	7230499	31/05/2029
261221	7230501	31/05/2029
261221	7230502	31/05/2028
261221	7230502	31/08/2028
261221	7230502	31/05/2029
261221	7230503	30/06/2028
261221	7230503	31/05/2028
261221	7230503	31/05/2028
261221	7230503	31/05/2028
261221	7230504	30/06/2028
261221	7230505	31/05/2029
261221	7230506	30/04/2028
261221	7230507	30/09/2027
261221	7230507	31/05/2028
261221	7230508	30/06/2028
261221	7230508	31/08/2028
261221	7230508	31/07/2028
261221	7230510	31/05/2028
261221	7230510	31/05/2029
261221	7230510	30/06/2028
261221	7230510	31/07/2028
261221	7230515	30/06/2028
261221	7230515	31/07/2028
261221	7230515	31/05/2029
261221	7230519	30/06/2028
261221	7230524	31/05/2028
261221	7230524	30/06/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7230526	30/06/2028
261221	7230526	31/05/2029
261221	7230527	30/06/2028
261221	7230529	31/05/2028
261221	7230529	31/05/2028
261221	7230530	31/07/2028
261221	7230537	30/04/2028
261221	7230538	30/06/2028
261221	7230541	30/04/2028
261221	7230541	31/07/2028
261221	7230542	31/08/2028
261221	7230544	31/07/2028
261221	7230544	31/05/2029
261221	7230553	30/06/2028
261221	7230553	30/11/2028
261221	7230563	31/05/2029
261221	7230563	31/05/2028
261221	7230579	30/04/2028
261221	7230582	31/05/2028
261221	7230583	31/07/2028
261221	7230583	31/07/2028
261221	7230583	31/05/2029
261221	7230587	31/05/2028
261221	7230587	31/07/2028
261221	7230592	31/05/2028
261221	7230592	30/06/2028
261221	7230595	30/04/2028
261221	7230595	31/05/2029
261221	7230595	31/05/2029
261221	7230596	31/05/2028
261221	7230596	31/07/2028
261221	7230596	31/05/2028
261221	7230597	31/05/2029
261221	7230598	30/06/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7230598	30/06/2028
261221	7230598	31/07/2028
261221	7230599	31/07/2028
261221	7230599	31/05/2029
261221	7230599	31/05/2028
261221	7230599	31/10/2028
261221	7230601	30/06/2028
261221	7230602	30/11/2028
261221	7230602	31/05/2028
261221	7230604	31/05/2028
261221	7230605	31/05/2029
261221	7230606	30/06/2028
261221	7230606	30/06/2028
261221	7230607	30/06/2028
261221	7230607	31/07/2028
261221	7230611	31/05/2028
261221	7230611	31/05/2029
261221	7230613	31/05/2029
261221	7230613	30/09/2028
261221	7230613	31/07/2028
261221	7230615	30/06/2028
261221	7230622	30/09/2028
261221	7230622	31/07/2028
261221	7233016	31/07/2028
261221	7233016	30/06/2028
261221	7233016	31/05/2028
261221	7233018	30/04/2029
261221	7233019	31/05/2028
261221	7233022	31/05/2029
261221	7233024	31/05/2029
261221	7233029	31/05/2028
261221	7233030	31/07/2028
261221	7233030	30/04/2029
261221	7233031	30/06/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7233035	31/08/2028
261221	7233035	31/05/2029
261221	7233036	31/05/2028
261221	7233036	31/05/2028
261221	7233036	31/07/2028
261221	7233038	31/07/2028
261221	7233040	31/07/2027
261221	7233040	31/12/2028
261221	7233044	30/11/2028
261221	7233044	31/05/2028
261221	7233044	31/05/2029
261221	7233045	31/05/2028
261221	7233045	31/07/2028
261221	7233045	30/06/2028
261221	7233045	30/04/2029
261221	7233047	30/06/2028
261221	7233048	31/05/2028
261221	7233052	31/05/2028
261221	7233052	31/05/2029
261221	7233053	31/05/2028
261221	7233055	30/04/2029
261221	7233057	31/07/2028
261221	7233058	30/04/2028
261221	7233058	31/05/2028
261221	7233060	31/07/2028
261221	7233060	31/05/2029
261221	7233064	30/06/2028
261221	7233078	31/07/2028
261221	7233078	30/06/2028
261221	7233082	31/07/2028
261221	7233082	31/07/2028
261221	7233082	31/05/2028
261221	7233086	31/07/2028
261221	7233093	30/04/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7233094	31/05/2028
261221	7233097	31/12/2028
261221	7233098	30/09/2028
261221	7233099	31/07/2028
261221	7233099	31/05/2029
261221	7233101	30/06/2028
261221	7233102	31/07/2028
261221	7233102	31/08/2028
261221	7233103	31/05/2028
261221	7233103	31/05/2029
261221	7233104	31/05/2029
261221	7233111	31/05/2028
261230	7255930	30/06/2028
261230	7255930	30/06/2028
261230	7255931	30/04/2029
261230	7255932	31/05/2028
261230	7255933	31/05/2028
261230	7255933	30/06/2028
261230	7255936	30/06/2028
261230	7255936	30/06/2028
261230	7255936	31/07/2028
261230	7255937	30/06/2028
261230	7255937	31/07/2028
261221	7257216	31/12/2028
261221	7257217	28/02/2029
261221	7257218	30/06/2028
261221	7257220	30/04/2029
261221	7257224	30/06/2028
261221	7257224	31/07/2028
261221	7257224	31/07/2028
261221	7257239	31/05/2029
261221	7262113	30/04/2029
261221	7262113	30/06/2028
261221	7262116	30/04/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7262116	30/06/2028
261221	7262116	31/07/2028
261221	7262117	30/04/2028
261221	7262117	30/04/2029
261221	7262122	30/06/2028
261221	7262122	31/05/2029
261221	7262123	31/07/2028
261221	7262124	31/08/2028
261221	7262124	30/06/2028
261221	7262126	31/05/2028
261221	7262126	31/05/2029
261221	7262127	31/05/2028
261221	7262127	31/05/2029
261221	7262127	31/05/2028
261221	7262128	31/05/2028
261221	7262128	31/07/2028
261221	7263601	31/05/2028
261221	7263601	30/06/2028
261221	7263601	30/06/2028
261221	7263602	31/05/2029
261221	7263605	30/04/2028
261221	7263608	31/05/2028
261221	7263609	31/05/2028
261221	7263609	30/04/2028
261221	7263609	31/03/2029
261221	7263610	30/04/2028
261221	7263610	30/06/2028
261221	7263610	31/05/2028
261221	7263610	31/07/2028
261221	7263612	31/07/2028
261221	7263613	31/10/2028
261221	7263613	31/08/2028
261221	7263614	31/05/2028
261221	7263615	30/06/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7263615	30/04/2028
261221	7263616	30/06/2028
261221	7263616	31/05/2028
261221	7263616	31/05/2028
261221	7263617	31/07/2028
261221	7263618	31/05/2028
261221	7263620	30/06/2028
261221	7263620	31/07/2028
261221	7263626	31/12/2027
261221	7263628	31/05/2028
261221	7263628	31/05/2028
261221	7263628	31/07/2028
261221	7263629	31/12/2027
261221	7263629	31/05/2028
261221	7263630	31/12/2028
261221	7263630	31/07/2028
261221	7263630	30/09/2028
261221	7263631	31/05/2028
261221	7263631	30/09/2028
261221	7263632	31/05/2028
261221	7263635	30/06/2028
261221	7263636	31/01/2028
261221	7263639	31/08/2028
261221	7263639	31/08/2028
261221	7263640	31/10/2028
261221	7263642	31/05/2028
261221	7263643	31/05/2028
261221	7263643	31/05/2029
261221	7263646	30/06/2028
261221	7263646	31/07/2028
261221	7263650	31/05/2028
261221	7263650	31/07/2028
261221	7263650	31/05/2028
261221	7263650	30/06/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7263650	31/05/2029
261221	7263652	31/01/2028
261221	7263657	30/06/2028
261221	7263658	30/06/2028
261221	7263658	31/08/2028
261221	7263679	30/06/2028
261221	7263679	31/05/2028
261221	7265898	31/05/2028
261221	7265898	30/06/2028
261221	7265918	30/06/2028
261221	7265918	31/12/2028
261221	7265958	31/05/2028
261221	7265958	31/08/2028
261221	7265963	31/10/2028
261221	7265963	30/06/2028
261221	7265972	31/12/2028
261221	7265972	30/06/2028
261221	7266302	31/07/2028
261221	7266308	31/10/2028
261221	7266308	31/10/2028
261221	7266311	31/05/2028
261221	7266314	30/04/2028
261221	7266316	31/07/2028
261221	7266319	31/05/2029
261221	7266319	30/04/2028
261221	7266332	30/06/2028
261221	7266332	31/05/2029
261221	7266345	31/07/2028
261221	7266350	30/04/2029
261221	7266352	31/05/2028
261221	7266358	30/06/2028
261221	7266360	31/10/2028
261221	7266361	30/04/2029
261221	7266361	31/05/2029

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7266363	31/05/2028
261221	7266371	31/05/2028
261221	7266377	30/06/2028
261221	7266377	31/07/2028
261221	7266377	31/05/2029
261230	7269522	30/06/2028
261230	7269522	30/06/2028
261230	7269522	30/06/2028
261230	7269525	31/07/2028
261230	7282944	31/08/2028
261230	7282946	31/03/2029
261221	7283009	31/05/2028
261221	7283009	31/07/2028
261221	7283009	31/07/2028
261221	7283009	31/07/2028
261221	7283009	31/07/2028
261221	7283015	31/05/2029
261221	7283016	31/05/2028
261221	7283016	31/07/2028
261221	7283016	31/05/2029
261221	7283016	31/05/2029
261221	7283016	31/07/2028
261221	7283016	31/05/2028
261221	7283019	31/05/2028
261221	7283019	31/05/2028
261221	7283019	31/05/2029
261221	7283019	31/07/2028
261221	7283019	31/07/2028
261221	7283023	31/05/2028
261221	7283023	31/07/2028
261221	7283023	30/04/2029
261221	7283026	31/05/2029
261221	7283026	30/09/2028
261221	7283035	31/05/2029

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7283070	30/06/2028
261221	7283070	31/05/2028
261221	7283070	31/05/2028
261221	7283070	31/05/2028
261221	7283073	31/05/2028
261221	7283073	31/05/2028
261221	7283082	31/05/2028
261221	7283082	31/05/2028
261221	7283082	31/07/2028
261221	7283084	31/05/2028
261221	7283084	31/07/2028
261221	7283091	31/05/2028
261221	7283091	30/06/2028
261221	7283098	31/05/2029
261221	7283098	30/06/2028
261221	7283111	31/08/2028
261221	7283111	31/05/2029
261221	7283111	31/12/2028
261221	7283111	31/07/2028
261221	7283112	30/06/2028
261221	7283131	31/05/2028
261221	7283131	30/09/2028
261221	7283154	31/05/2028
261221	7283155	31/08/2028
261221	7283155	31/05/2029
261221	7283158	31/07/2028
261221	7283158	30/06/2028
261221	7283158	31/05/2028
261221	7283159	30/06/2028
261221	7283159	31/07/2028
261221	7283160	31/07/2028
261221	7283162	30/09/2028
261221	7283170	31/05/2028
261221	7283172	31/05/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7283172	31/10/2028
261221	7283174	31/05/2028
261221	7283175	30/06/2028
261221	7283182	30/04/2028
261221	7283182	30/11/2028
261221	7283182	31/05/2028
261221	7283183	30/04/2028
261221	7283183	30/06/2029
261221	7283191	30/06/2028
261221	7283191	31/03/2029
261221	7283193	30/06/2028
261221	7283194	30/06/2028
261221	7283196	30/06/2028
261221	7283211	30/04/2028
261221	7283211	30/06/2028
261221	7283211	30/06/2028
261221	7283228	31/07/2028
261221	7283232	31/07/2028
261221	7283233	31/05/2028
261221	7283235	31/07/2028
261221	7283236	31/07/2028
261221	7283240	31/05/2028
261221	7283240	30/06/2028
261221	7283242	31/05/2029
261221	7283243	31/07/2028
261221	7283249	31/12/2028
261221	7283249	31/05/2028
261221	7283250	31/07/2028
261221	7283250	31/07/2028
261221	7283258	31/05/2028
261221	7283259	30/06/2028
261221	7283259	30/06/2028
261221	7283259	31/05/2028
261221	7283260	31/10/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7283260	30/06/2028
261221	7283260	30/04/2029
261221	7283260	31/08/2028
261221	7283264	31/08/2028
261221	7283267	31/05/2028
261221	7283267	30/04/2028
261221	7283270	30/09/2028
261221	7283272	31/05/2028
261221	7283273	31/05/2028
261221	7283273	30/06/2028
261221	7283273	30/04/2029
261221	7283274	30/06/2028
261221	7283274	31/08/2028
261221	7283275	31/05/2028
261221	7283277	31/05/2029
261221	7283277	30/06/2028
261221	7283279	31/05/2028
261221	7283279	30/04/2029
261221	7283282	31/05/2029
261221	7283282	31/05/2028
261221	7283282	31/10/2028
261221	7283283	31/07/2028
261221	7283285	30/11/2028
261221	7283285	30/06/2028
261221	7283286	31/05/2028
261221	7283286	31/05/2028
261221	7283286	31/07/2028
261221	7283289	31/05/2029
261221	7283289	31/07/2028
261221	7283290	30/04/2029
261221	7283295	31/08/2028
261221	7283295	30/06/2028
261221	7283297	31/05/2029
261221	7283297	31/05/2029

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7283297	28/02/2029
261221	7283297	30/11/2028
261221	7283298	31/05/2029
261221	7283298	31/03/2029
261221	7283298	31/03/2029
261221	7283298	31/07/2028
261221	7283300	31/08/2028
261221	7283301	31/07/2028
261221	7283302	31/05/2028
261221	7283302	31/08/2028
261221	7283302	30/06/2028
261221	7283302	31/05/2028
261221	7283302	31/10/2028
261221	7283307	31/05/2028
261221	7283307	31/10/2028
261221	7283308	31/05/2029
261221	7283309	31/05/2028
261221	7283310	31/05/2029
261221	7283310	30/06/2028
261221	7283316	30/06/2028
261221	7283317	30/06/2028
261221	7283318	31/07/2028
261221	7283318	31/07/2028
261221	7283322	31/07/2028
261221	7283324	30/06/2028
261221	7283326	31/05/2028
261221	7283328	31/08/2028
261221	7283328	30/06/2028
261221	7283328	31/07/2028
261221	7283329	31/05/2029
261221	7283329	31/07/2028
261221	7283330	31/05/2028
261221	7283333	31/05/2029
261221	7283335	30/06/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7283336	30/06/2028
261221	7283338	30/06/2028
261221	7283338	31/05/2028
261221	7283338	31/05/2029
261221	7283340	31/05/2028
261221	7283344	30/06/2028
261221	7283345	31/07/2028
261221	7283347	31/07/2028
261221	7283348	31/05/2029
261221	7283352	31/05/2028
261221	7283352	31/08/2028
261221	7283352	31/05/2029
261221	7283353	30/06/2028
261221	7283355	31/07/2028
261221	7283356	30/04/2028
261221	7283356	31/05/2029
261221	7283361	31/05/2028
261221	7283361	31/05/2028
261221	7283361	30/06/2028
261221	7283364	31/08/2028
261221	7283367	31/05/2029
261221	7283368	31/05/2028
261221	7283369	31/07/2028
261221	7283372	31/05/2028
261221	7283373	30/04/2029
261221	7283374	31/07/2028
261221	7283374	31/08/2028
261221	7283378	30/06/2028
261221	7283380	31/05/2029
261221	7283380	31/05/2028
261221	7283382	31/05/2028
261221	7283383	31/05/2028
261221	7283384	31/05/2028
261221	7283384	30/04/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7283384	30/04/2029
261221	7283385	30/09/2028
261221	7283385	31/08/2028
261221	7283386	30/09/2028
261221	7283386	30/06/2028
261221	7283386	30/06/2028
261221	7283388	31/05/2028
261221	7283388	31/05/2028
261221	7283389	30/06/2028
261221	7283389	31/01/2028
261221	7283389	31/05/2028
261221	7283390	30/06/2028
261221	7283391	30/06/2028
261221	7283393	30/06/2028
261221	7283393	30/06/2028
261221	7283394	31/05/2029
261221	7283394	31/01/2029
261221	7283396	31/05/2028
261221	7283396	31/05/2028
261221	7285288	30/06/2028
261221	7285289	30/06/2028
261221	7285290	30/09/2028
261221	7285291	31/05/2028
261221	7285292	31/12/2028
261221	7285292	31/05/2029
261221	7285294	30/06/2028
261221	7285294	31/05/2028
261221	7285297	31/05/2028
261221	7285297	30/06/2028
261221	7285297	31/05/2029
261221	7285298	30/06/2028
261221	7285299	31/05/2028
261221	7285300	31/05/2028
261221	7285301	31/08/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7285302	31/05/2029
261221	7285305	30/09/2028
261221	7285305	31/05/2029
261221	7285308	30/06/2028
261221	7285309	31/01/2029
261221	7285310	30/06/2028
261221	7285310	31/08/2028
261221	7285311	30/09/2028
261221	7285312	30/04/2028
261221	7285312	31/05/2029
261221	7285313	31/12/2028
261221	7285313	31/05/2028
261221	7285315	31/05/2028
261221	7285315	31/05/2029
261221	7285316	31/07/2028
261221	7285317	31/05/2029
261221	7285317	31/10/2028
261221	7285319	30/06/2028
261221	7285319	31/05/2028
261221	7285320	31/08/2028
261221	7285320	31/05/2029
261221	7285324	30/06/2028
261221	7285324	30/04/2028
261221	7285326	30/06/2028
261221	7285326	31/05/2028
261221	7285327	31/05/2028
261221	7285327	31/05/2028
261221	7285328	31/07/2028
261221	7285329	31/12/2028
261221	7285331	31/08/2028
261221	7285332	31/07/2028
261221	7285332	31/08/2028
261221	7285334	31/05/2028
261221	7285334	30/06/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7285335	30/04/2028
261221	7285335	30/06/2028
261221	7285336	31/01/2029
261221	7285337	31/07/2028
261221	7285338	31/05/2029
261221	7285338	31/05/2029
261221	7285339	31/08/2028
261221	7285344	31/05/2028
261221	7285344	31/05/2028
261221	7285345	31/05/2028
261221	7285345	31/05/2028
261221	7285348	30/06/2028
261221	7285349	31/05/2028
261221	7285350	31/08/2028
261221	7285351	30/06/2027
261221	7285351	31/05/2028
261221	7285358	31/07/2028
261221	7285358	30/06/2028
261221	7285359	31/05/2028
261221	7285359	30/06/2028
261221	7285359	31/05/2029
261221	7285361	31/08/2028
261221	7285363	30/06/2028
261221	7285365	31/05/2028
261221	7285366	31/08/2028
261221	7285367	31/05/2028
261221	7285367	31/05/2028
261221	7289157	31/05/2028
261221	7289157	31/05/2029
261221	7289159	31/07/2028
261221	7289160	31/05/2028
261221	7289160	30/06/2028
261221	7289161	31/08/2028
261221	7289161	31/08/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7289164	31/07/2028
261221	7289166	31/05/2028
261221	7289166	31/05/2028
261221	7289166	31/05/2028
261221	7289166	31/01/2029
261221	7289167	31/05/2028
261221	7289167	31/05/2028
261221	7289169	30/06/2028
261221	7289172	30/04/2028
261221	7289172	31/05/2028
261221	7289172	30/04/2029
261221	7289177	31/05/2028
261221	7289177	31/07/2028
261221	7289180	31/07/2028
261221	7289180	30/06/2028
261221	7289181	30/06/2028
261221	7289182	31/07/2028
261221	7289185	30/06/2028
261221	7289185	31/05/2029
261221	7289185	30/09/2028
261221	7289185	30/06/2028
261221	7289188	31/05/2029
261221	7289188	31/05/2028
261221	7289189	31/10/2028
261221	7289192	31/05/2028
261221	7289192	31/05/2029
261221	7289193	31/05/2028
261221	7289194	30/06/2028
261221	7289194	31/07/2028
261221	7289198	31/10/2028
261221	7289200	30/06/2028
261221	7289210	31/01/2029
261221	7289213	31/12/2028
261221	7289214	31/05/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7292798	31/05/2028
261221	7292798	30/06/2028
261221	7292799	30/06/2028
261221	7292802	31/05/2029
261221	7292802	31/05/2029
261221	7292803	30/06/2028
261221	7292803	31/07/2028
261221	7292803	31/05/2029
261221	7292810	31/05/2029
261221	7292811	31/10/2028
261221	7292814	31/08/2028
261221	7292817	30/06/2028
261221	7292817	31/05/2028
261221	7292820	31/05/2028
261221	7292821	31/10/2027
261221	7292822	31/08/2028
261221	7292822	31/07/2028
261221	7292823	31/05/2029
261221	7292823	30/06/2028
261221	7292824	31/08/2028
261221	7292824	31/10/2028
261221	7292826	31/07/2028
261221	7292828	31/05/2028
261221	7292828	31/05/2028
261221	7292831	31/05/2028
261221	7292840	31/08/2028
261221	7292842	31/05/2028
261221	7292846	31/05/2028
261221	7292846	31/05/2028
261221	7292847	31/10/2028
261221	7292847	30/04/2028
261221	7292847	31/10/2028
261221	7292847	31/08/2028
261221	7292853	31/12/2028

Riferimento prodotto	Numero di lotto	Data di scadenza
261221	7292856	31/07/2028
261221	7292858	31/05/2029
261221	7292862	30/04/2028
261221	7292871	30/09/2028
261221	7292875	31/07/2028
261221	7292875	30/04/2028
261221	7309285	31/05/2029
261221	7309285	30/09/2028
261221	7309288	31/05/2028
261221	7309288	30/11/2028
261221	7309499	30/04/2028
261221	7344213	31/05/2028
261221	7344220	31/08/2028
261221	7344230	30/09/2028
261221	7344240	30/06/2028